


オプティカルクロージャートロカー
12mm

クイックガイド

各部位名称

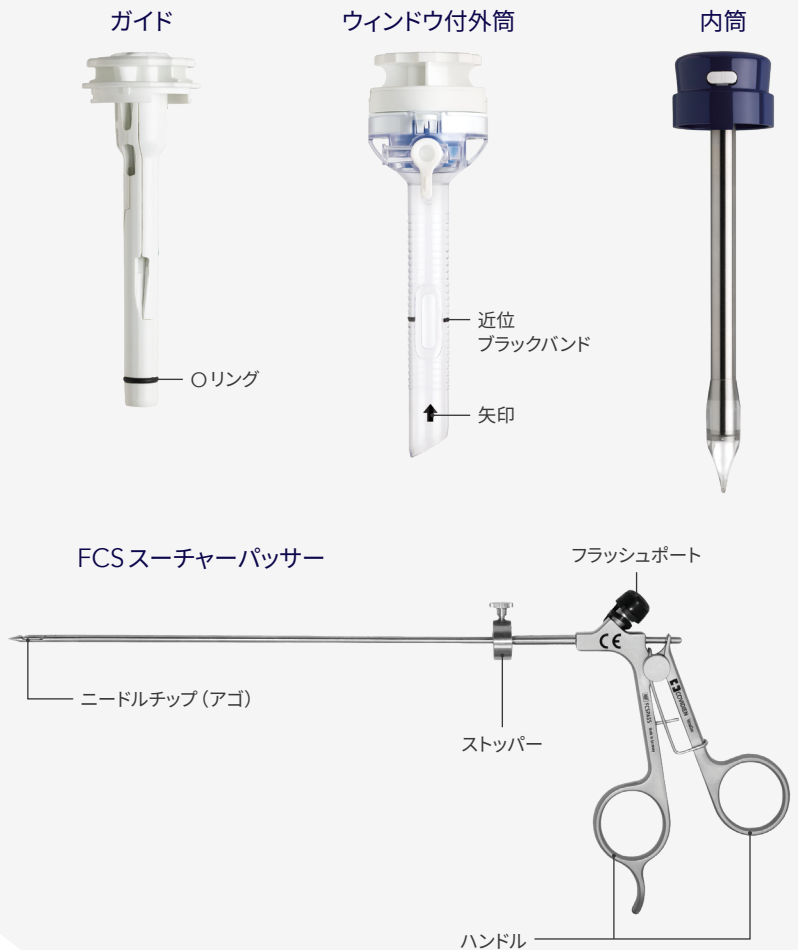

STEP 1

閉創の準備ができたなら、このトロカーから送気している場合は、他のトロカーへ送気チューブを入れ替える。
リリースボタンを押しながら、自動調節シールを反時計回りに回して外す。

注意：自動調節シールをつけたままでガイドを挿入しないで下さい



STEP 2


外筒にガイドを奥まで挿入し、
カチッと音が鳴るまでガイドの矢印の方向（時計回り）に回転させる。



STEP 3

外筒を皮膚に対し90度に保持し、Oリングが腹膜のラインに並ぶように、外筒の深さを調整する。その際に近位ブラックバンドが見えていない(皮膚の下にある)事を確認する。

注意：矢印の位置が縫合位置となる

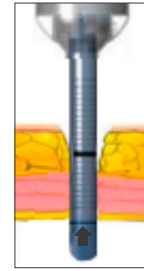


STEP 4

閉創用の糸のテール(25mm以上)をスーチャーパッサーでつかむ。




STEP 5

- 外筒を保持し、ガイドの片側の入口から糸を把持したスーチャーパッサーを挿入し、腹壁を貫通し腹腔内に到達させる。
- 別のトロカーから入れた鉗子で縫合糸を把持し、スーチャーパッサーから糸を外し、スーチャーパッサーをガイドから抜去する。
- 腹腔内の縫合糸を鉗子で十分な長さまで引っ張る。

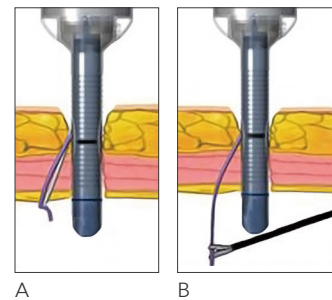

STEP 6

- 外筒を保持し、もう一方のガイドの入口からスーチャーパッサーを挿入し腹壁を貫通し腹腔内に到達させる。
- 腹腔内の縫合糸をスーチャーパッサーでつかみ(糸のテール25mm以上)、スーチャーパッサーをガイドから抜去する。
- スーチャーパッサーがガイドから完全に抜去された状態で縫合糸を外し、トロカーを抜去し結紮する。

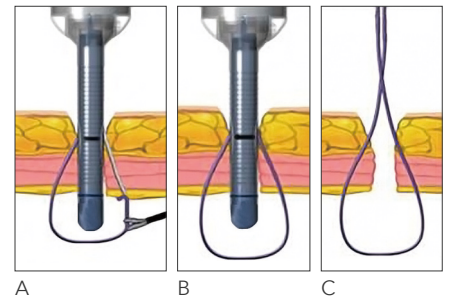

Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社

Tel : 0120-998-971

medtronic.co.jp

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。

© 2020, 2024 Medtronic. Medtronic及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。

販売名：VersaOne Fascial Closure システム
医療機器認証番号：302AABZX00012000
クラス：II

販売名：Fascia クロージングデバイス
医療機器届出番号：13B1X00069US027A
クラス：I

mt-ai-tr-ocqg(02)
2406.pdf.es.y.SI-AI597