

## コンテグラ 洗浄方法

注意：15分以上継続的に洗浄を行ってください。



### Step 1



使用するサイズおよび製品の箱に損傷が無いを確認します。  
また、製品容器に記載されているサイズと製品番号が外箱と一致しているか確認します。

### Step 2



清潔野に4個の滅菌済ボウルを準備し、そのうち3個に洗浄用の滅菌生理食塩液(500mL)を入れます。

### Step 3



封印シールが未開封であることを確認します。万が一開封されている場合は、本品を使用しないでください。  
未開封が確認できたら、蓋を反時計周りに回して容器を開封します。

### Step 4



無外傷性鉗子で製造番号タグを挟み、持ち上げてから本品を容器から取り出します。  
製造番号タグは、本品の流出側末端に縫合されているので、製造番号タグと容器の表示が一致していることを確認します。  
万が一相違が認められた場合は、本品を使用しないでください。また、製造番号タグは、植込み直前まで本品から取り外さないでください[注：容器の外側は未滅菌です]。

### Step 5



製造番号タグ(流出側)が下側、流入側が上側になるように本品を(指で)保持し、残留した保存液を空の「廃液用ボウル」に排出します。[注：本品中央の若干太い部位(洞)には弁が存在します。当該洞部位に触れないでください。]  
本品の洞より下の部分(流出側)を(指でそっと)穏やかに絞り、保存液の大部分を除去します。

### Step 6



本品を「第1洗浄用ボウル」に移します。本品を洗浄液に浸し、洞の上部(流出側)および下部域(流入側)を(指で)軽く絞ります。本品に洗浄液を満たします。製造番号タグ(流出側)を下向き、流入側を上向きにした状態で、本品を指で傾け、洗浄液を完全に排出させます。本品に洗浄液を満たし、かき混ぜ、そっと絞り出し、空にするという作業を5分間繰り返します。  
本品から洗浄液をすべて除去したあと、次のボウルに移します。

### Step 7



本品を「第2洗浄用ボウル」に移し、「STEP 6」を5分以上繰り返します。

### Step 8



本品を「第3洗浄用ボウル」に移します。上記「第1洗浄用ボウル」および「第2洗浄用ボウル」で行った方法と同一の方法で5分以上洗浄します。本品の組織の乾燥を防ぐため、植込みを行うまで、本品を「第3洗浄用ボウル」に入れておきます。

### Step 9



本品から洗浄液を完全に排出させたあと、術野に手渡します。  
製造番号タグおよびタグ取付け糸は、執刀医又は助手が取り除いてください。