

ミニメド™モバイルアプリの セットアップ方法

2023年7月版：

ミニメド770G専用



STEP 1

P1 はじめに

ミニメド™モバイルアプリご登録・ご使用に際しての事前注意事項の説明します

STEP 2

P2 アプリを開く

STEP 3

P3-5 説明を確認する

アプリの概要に関する説明を確認します

STEP 4

P6-P44 ケアリンクパーソナルへの登録を行う

ミニメド™モバイルアプリをご利用いただくために必要な、ケアリンクパーソナルのアカウントの作成方法や重要な注意事項・同意事項の説明します

STEP 5

P45-50 ケアリンクパーソナルにログインする

前のステップで作成したケアリンクパーソナルにログインします

STEP 6

P51-P76 アプリの設定とポンプとのペアリングを行う

アプリの通知等の設定と、アプリにお使いのポンプを認識させ、紐づける作業を行います

STEP 7

P77 アプリを使用する

1

はじめに

- ミニメド™モバイルアプリならびにケアリンクパーソナルのご登録は18歳以上の方のみ可能です
- 患者さんご自身が18歳未満の場合は親権者が代理で登録を行ってください
- ご登録に際し、メールアドレスの入力と、入力したメールアドレスに送信されたメールの確認が必要になります。登録予定のメールアドレスに届くメールの開封ができる状況でご登録をお願いいたします
- ご登録にはパソコンのメールアドレスが必要です。GmailやYahoo!メール、outlookメールなど、キャリアメール（@以下がdocomo/ezweb/softbank等）以外のメールアドレスのご用意をお願いいたします

2

アプリを開く

「MiniMed™ Mobile」アプリをタップし、アプリを開きます。

レニーのワンポイントアドバイス


アプリアイコンの一例：



使用しているスマートフォンやOSのバージョンによって、アプリの表示イメージは変わります。

タップとは、画面を指先で軽く1回叩く操作です。

ちょん、と短くタッチするイメージで触れてください。

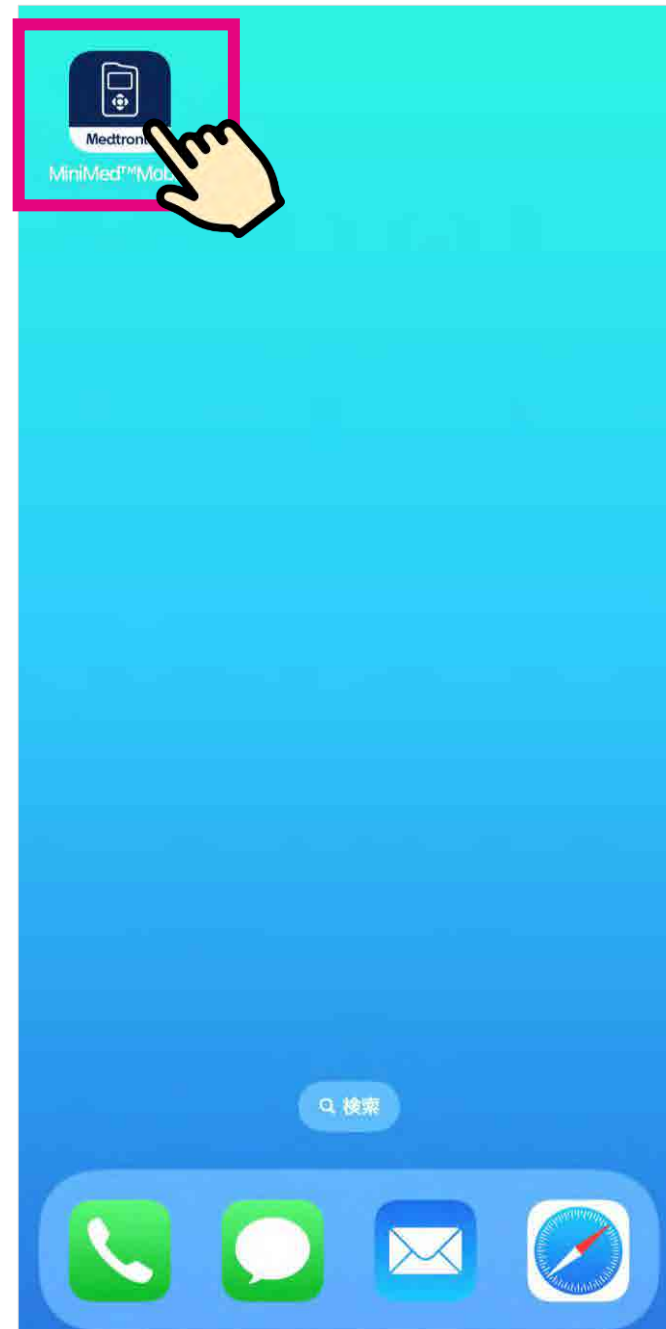

3

説明を確認する

記載されている説明文を読み、
「次へ」をタップします



4

説明を確認する

記載されている説明文を読み、
「次へ」をタップします



5

説明を確認する

記載されている説明文を読み、
「次へ」をタップします



6

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

「国または地域」をタップします。



7

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

国または地域の選択画面に移動します。

日本は下のほうに表示されていますので、スクロールアップしてください。

レニーのワンポイントアドバイス

スクロールアップとは、指先で画面に触れ、その指先を触れたまま上方向にスッと滑らせ移動させる操作です。画面が下から上に移動し、隠れていた部分が見えるようになります



8

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

「日本」をタップします。



9

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

「国または地域」に「日本」が表示されていることを確認し、「登録」をタップします。




10

ケアリンク™パーソナルへの登録を行う

ケアリンク™パーソナルの利用規約の確認画面が表示されます。

画面に掲載された案内文をよく読み、内容を確認してください。

続きを読むためには、スクロールアップを行い、最下部まで表示します。

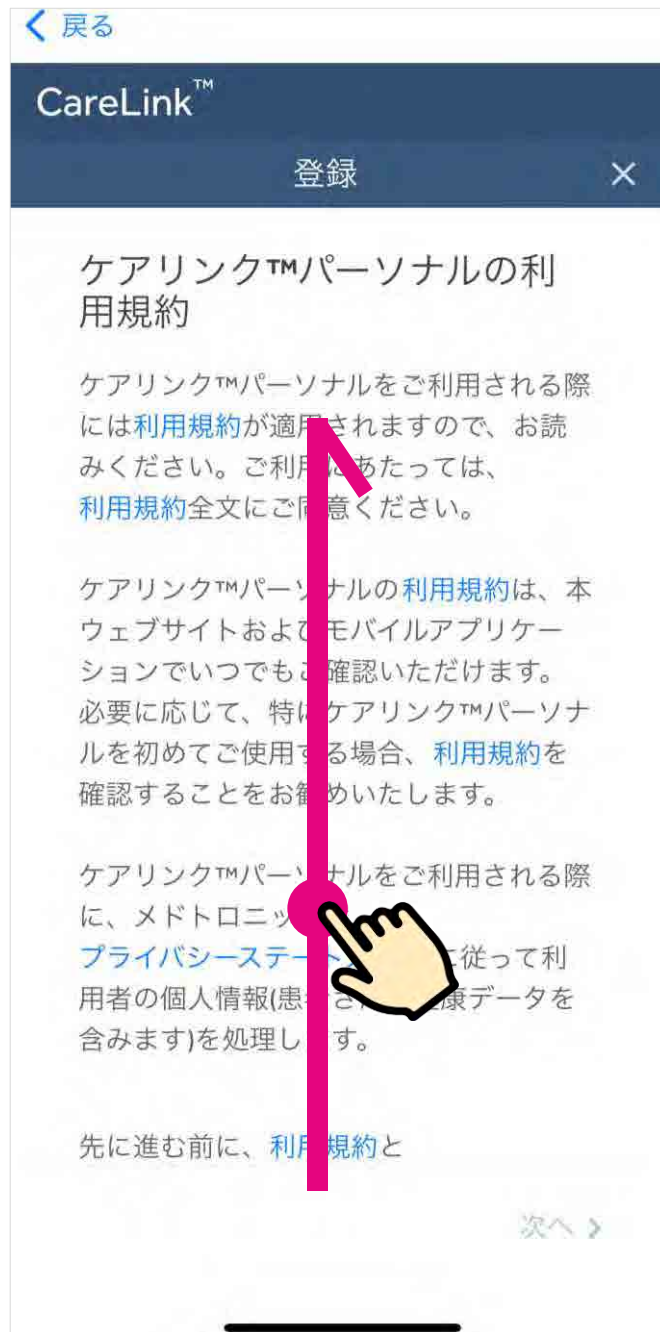


11

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

次のページに進むためには、利用規約及びプライバシーステートメントの確認が必要です。

最初に、青字の「利用規約」をタップしてください。

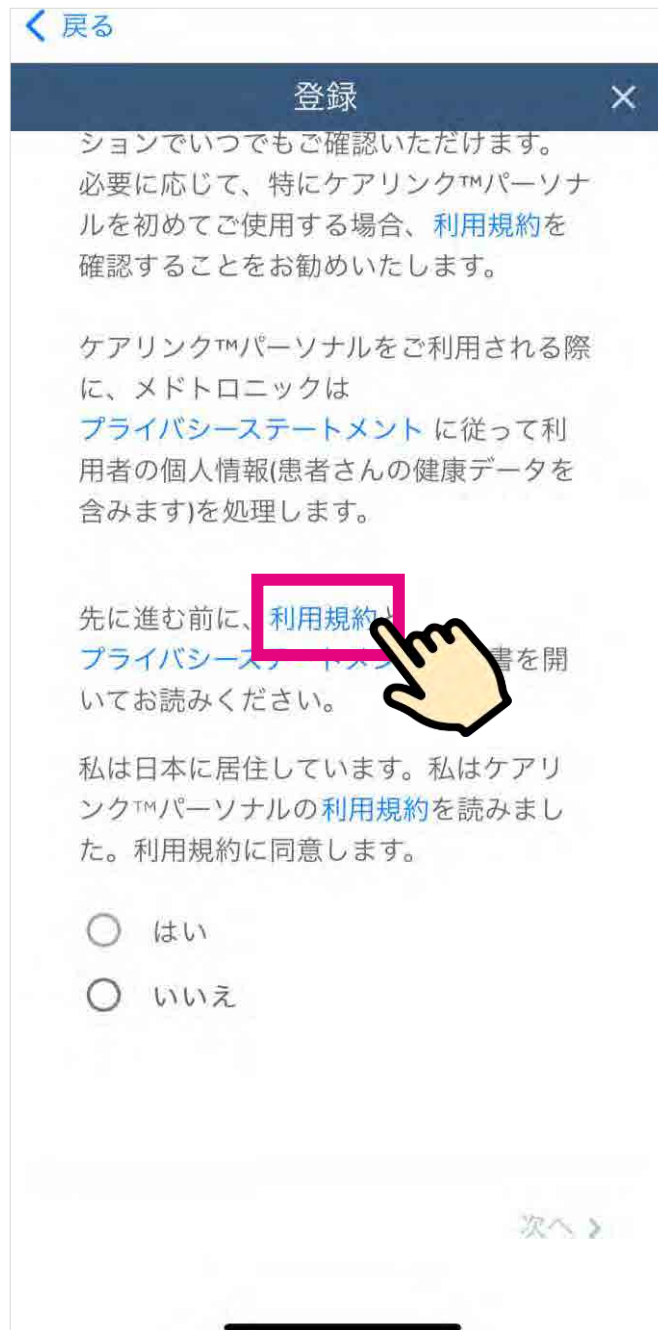


12

ケアリンク™パーソナルへの登録を行う

別のウィンドウでブラウザ画面が開き、利用規約が表示されます。

こちらは、先ほどアプリでご確認いただいた利用規約の詳細を記載した、正規の利用規約です。ご一読いただき、内容を確認してください。

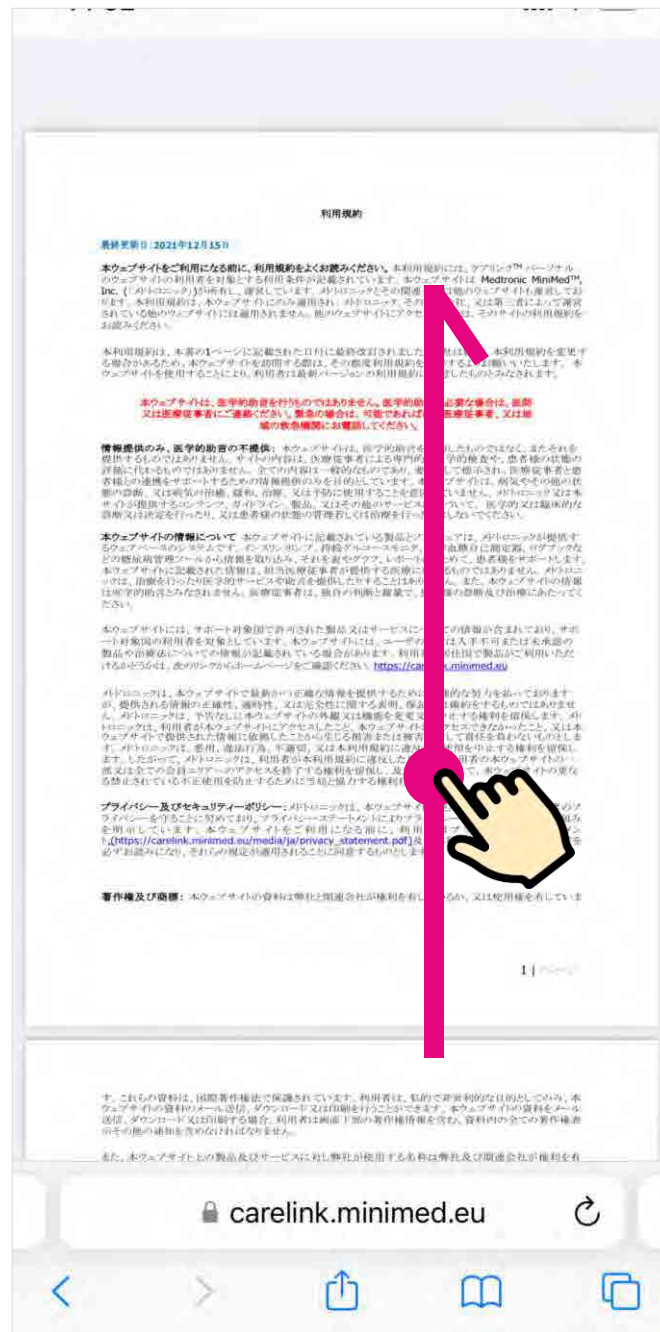

13

ケアリンク™パーソナルへの登録を行う

利用規約の詳細を確認したら、もう一度アプリに戻ります。

現在表示されているブラウザ画面からミニメド™モバイルアプリへの切り替え方法は機種によって異なりますが、多くの機種で画面下から上方向にスワイプすることで切り替えることが可能です。

レニーのワンポイントアドバイス



スワイプとは、スクロール同様指先で画面に触れ、その指先を触れたままスッと滑らせ移動させる操作です。



14


ケアリンク™パーソナルへの登録を行う

「MiniMed™ Mobile」アプリをタップすると「MiniMed™ Mobile」アプリに戻ります。

レニーのワンポイントアドバイス

画面の切り替え方法は機種によって異なります。

こちらの説明に当てはまらない場合は、お使いのスマートフォンの取り扱い説明書をご確認ください。

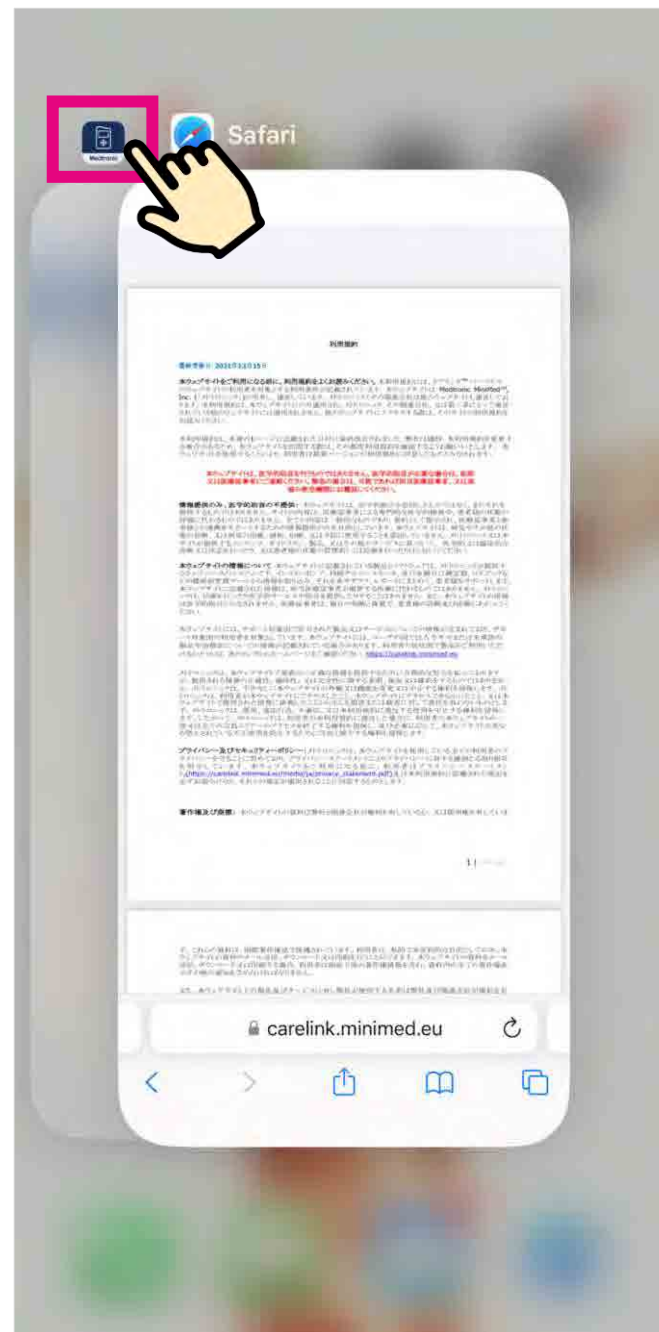


15

ケアリンク™パーソナルへの登録を行う

続いて、「プライバシーステートメント」の確認を行います。

青字の「プライバシーステートメント」をタップしてください。

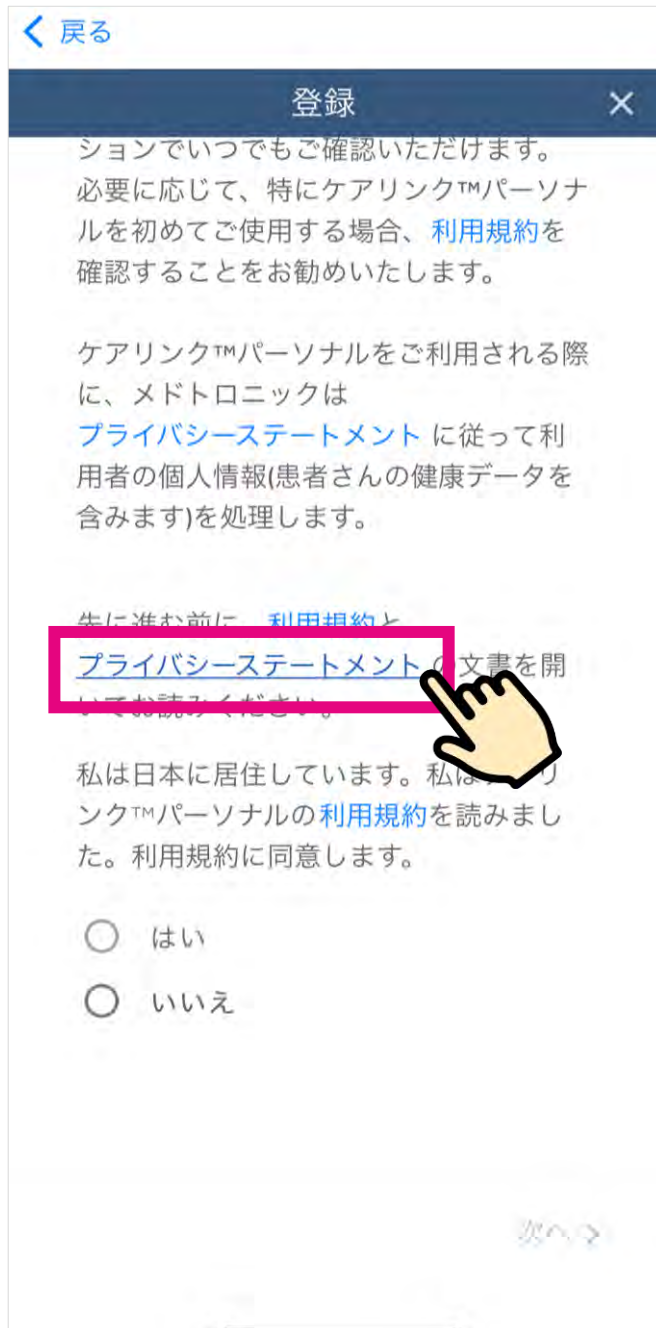


16

ケアリンク™パーソナルへの登録を行う

別のウィンドウでブラウザ画面が開き、

「CareLink™個人のプライバシーに関する声明」が表示されます。

利用規約同様、ご一読いただき内容を確認してください。

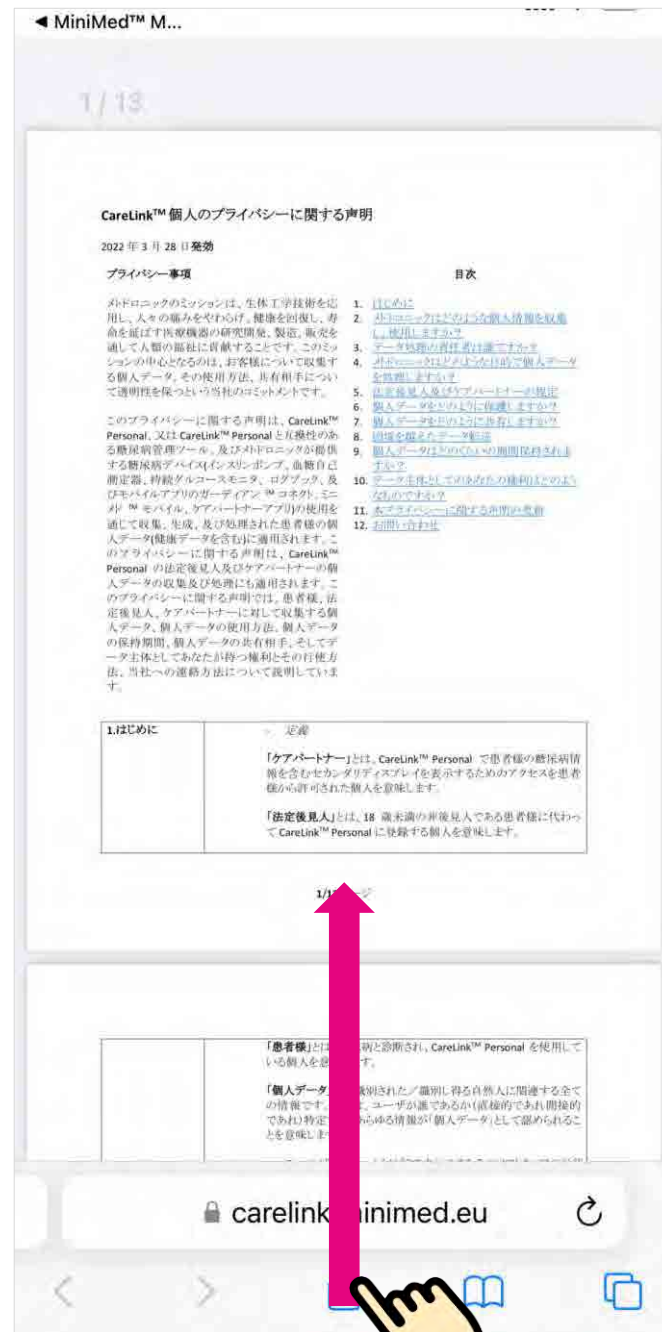

17

ケアリンク™パーソナルへの登録を行う

「CareLink™個人のプライバシーに関する声明」を確認したら、先ほどの利用規約と同じ方法で、もう一度アプリに戻ります。



18

ケアリンク™パーソナルへの登録を行う

「はい」「次へ」の順にタップします。

レニーのワンポイントアドバイス

利用規約とプライバシーステートメントの確認を行っていない場合は「はい」を選択できません。必ず⑪～⑰でご案内した利用規約とプライバシーステートメントの確認を行ってください。

「いいえ」を選択される場合、利用規約に同意されないためケアリンクパーソナルをご利用できず、下記の案内が表示されます。



「いいえ」を選択したときの画面イメージ：

私は日本に居住しています。私はケアリンク™パーソナルの利用規約を読みました。利用規約に同意します。

- はい
 いいえ

「いいえ」を選択される場合、利用規約に同意されないため、ケアリンクパーソナルをご利用できませんのでご了承ください。

< 戻る

登録

×

ションでいつでもご確認いただけます。必要に応じて、特にケアリンク™パーソナルを初めてご使用する場合、[利用規約](#)を確認することをお勧めいたします。

ケアリンク™パーソナルをご利用される際に、メドトロニックは[プライバシーステートメント](#)に従って利用者の個人情報(患者さんの健康データを含みます)を処理します。

先に進む前に、[利用規約](#)と[プライバシーステートメント](#)の文書を開いてお読みください。

私は日本に居住しています。私はケアリンク™パーソナルの[利用規約](#)を読みました。利用規約に同意します。

はい

いいえ

次へ >


19

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

ご登録を行っている方ご自身が18歳以上の場合は「私は18歳以上の利用者です。」をタップしてください。

18歳未満の方の親権者の方が登録を行っている場合は「私は18歳未満の利用者を代理して同意する親権者です」をタップしてください。

「次へ」をタップします。

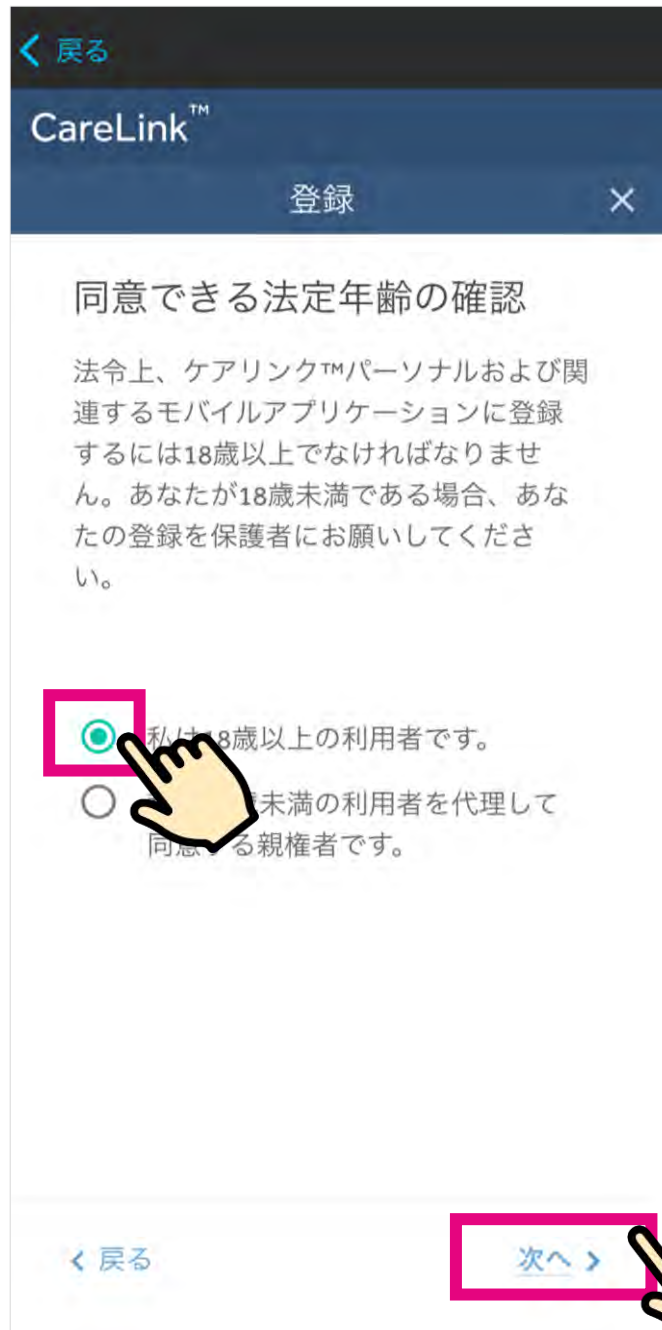


20

ケアリンク™パーソナルへの登録を行う

続いて、個人情報の処理に関する同意です。

スクロールアップし、最後まで記載内容をご確認ください。

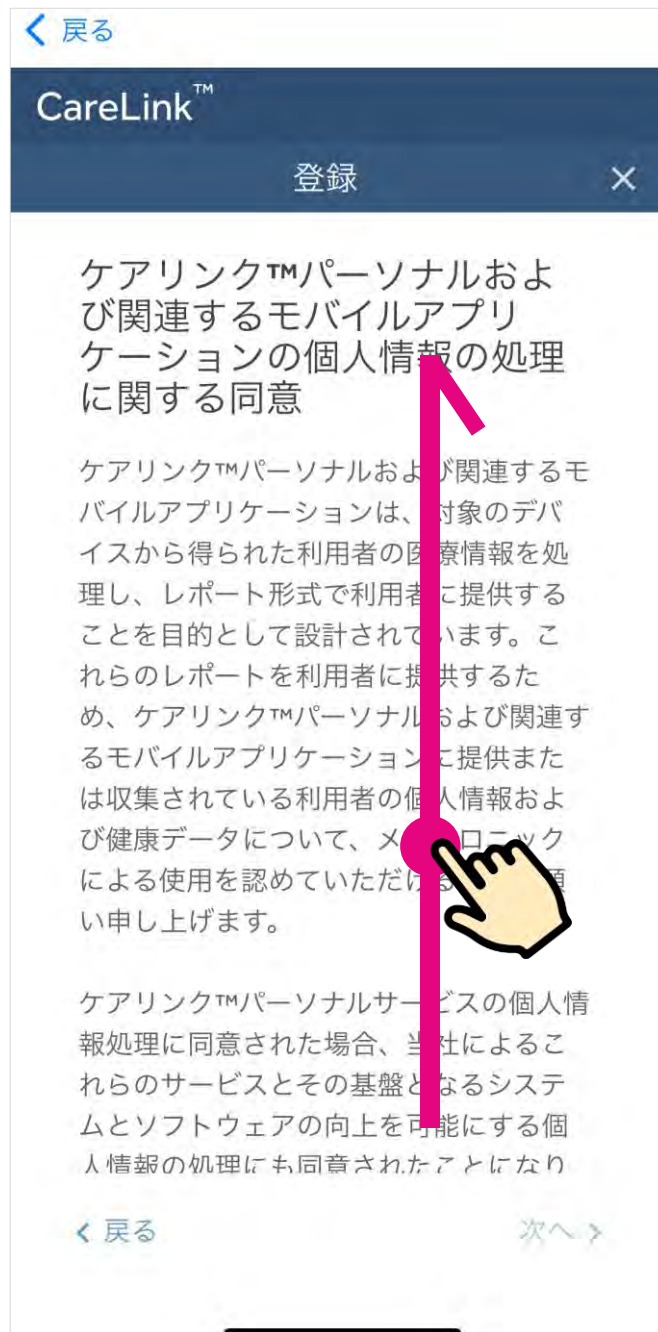

21

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

最後まで内容を確認し、同意したら「はい」
「次へ」の順でタップしてください。

< 戻る

登録 ×

「いいえ」を選択された場合、ソフトウェアで様々なレポートを作成するために必要なデータ処理ができなくなります。しかし、ガーディアン™コネクスト持続グルコースモニタシステム以外のデバイス(例えば持続グルコースモニタリング機能付きのインスリンポンプ、血糖自己測定器など)は引き続きご利用いただけます。

私は、ケアリンク™パーソナルおよび関連するモバイルアプリケーションの使用に関連し、メドトロニックおよびその委託先が、私の個人情報(健康データを含みます)を収集し、使用する(個人情報をアメリカ合衆国へ移転することを含みます)ことに、同意します。

はい

いいえ

< 戻る


次へ >

22

ケアリンク™パーソナルへの登録を行う

健康データを含む個人情報をメドトロニックが利用することの同意です。

スクロールアップし、最後まで記載内容をご確認ください。

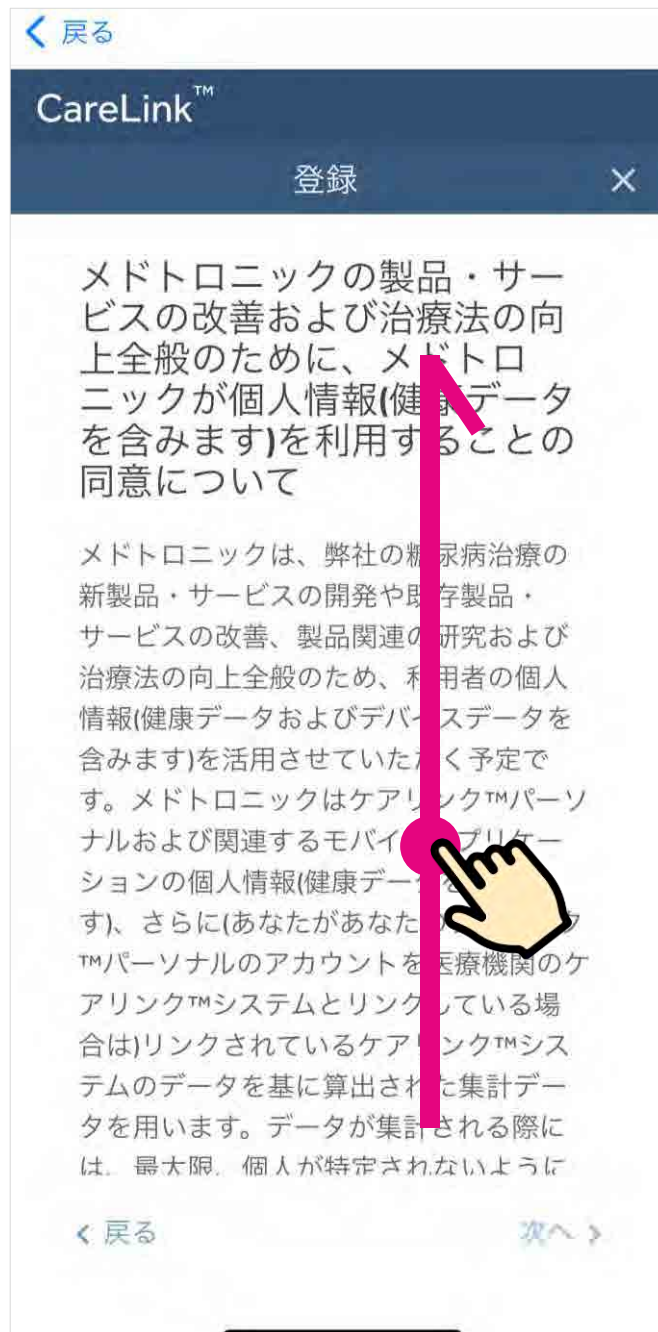


23

ケアリンク™パーソナルへの登録を行う

最後まで内容を確認し、同意する場合は「はい」「次へ」の順でタップしてください。

同意しない場合は「いいえ」を選択し、「次へ」をタップします。

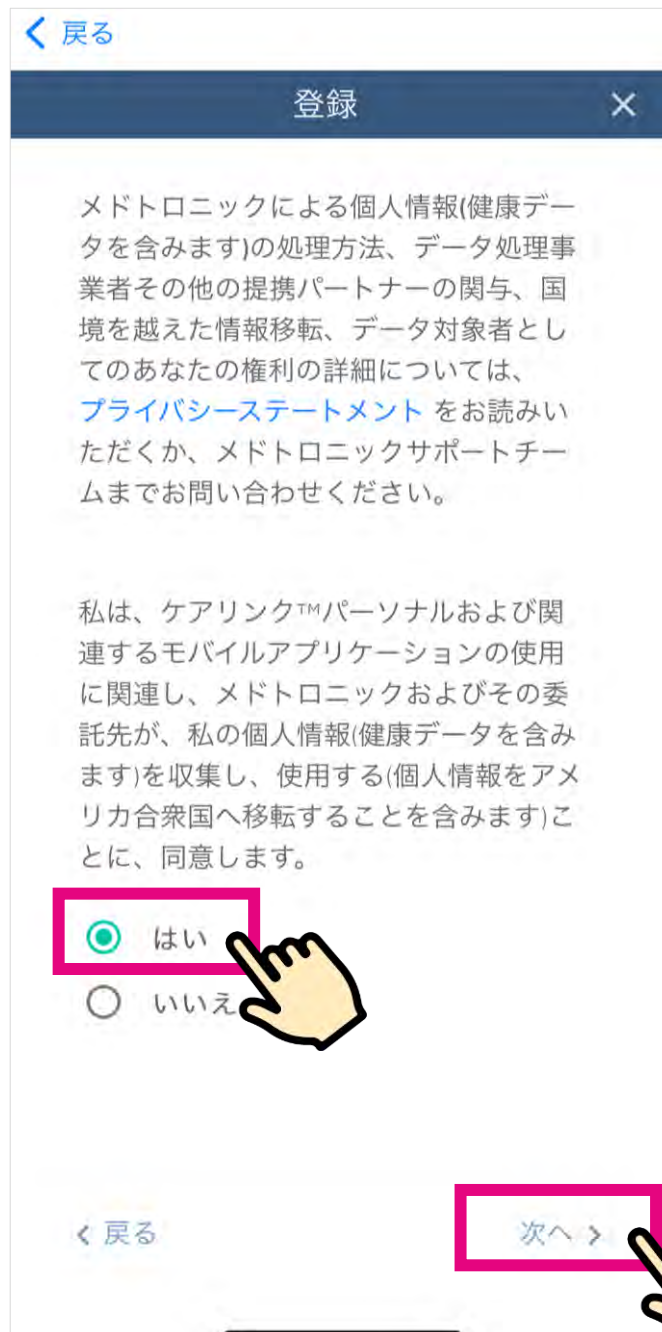


24

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

緊急の際のテキストメッセージ送信に関する説明です。

スクロールアップし、最後まで記載内容をご確認ください。

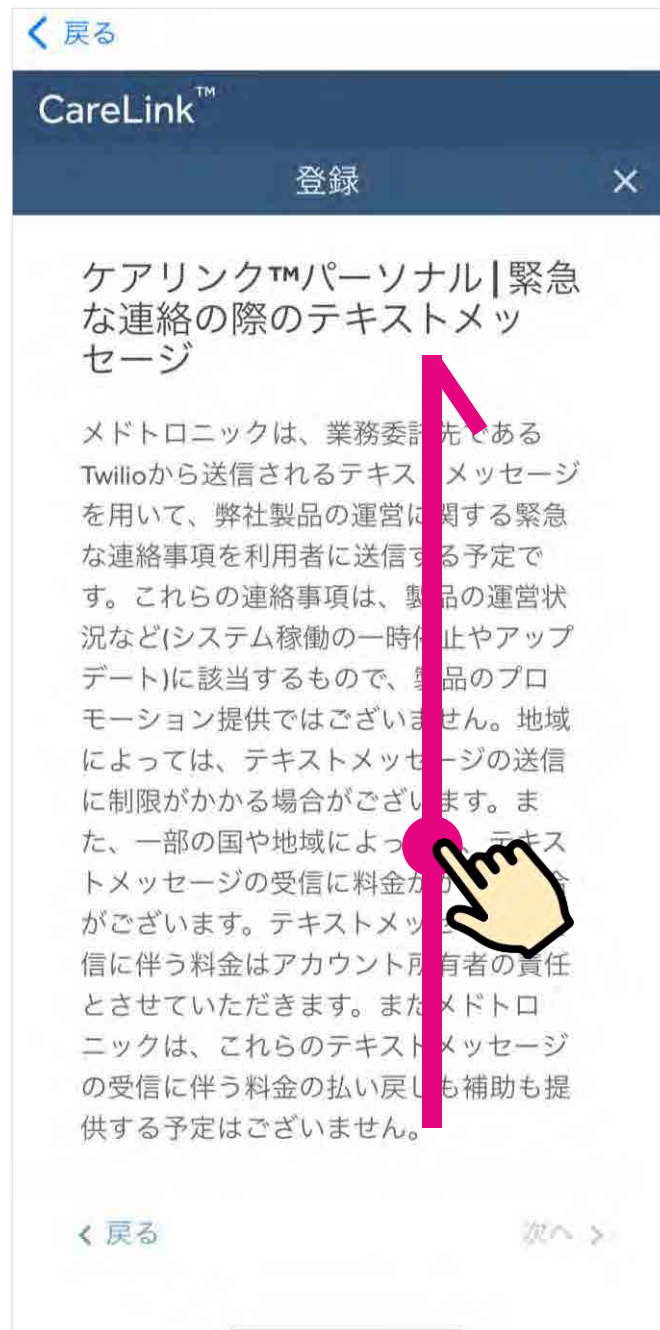

25

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

最後まで内容を確認し、同意したら「はい」
「次へ」の順でタップしてください。

< 戻る

登録 ×

運営に関する緊急な連絡事項は電子メールにて送信されます。

メドトロニックによる個人情報(健康データを含みます)の処理方法、データ処理事業者その他の提携パートナーの関与、国境を越えた情報移転、データ所有者のあなたの権利の詳細については、メドトロニックの「[テキストメッセージの送信について](#)」、「[プライバシーステートメント](#)」を確認されるか、メドトロニックサポートチームにお問い合わせください。

メドトロニックからの製品の運営に関するテキストメッセージの送信を許可しますか?

はい

いいえ

< 戻る


次へ >

26

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

家族・保護者などへのテキストメッセージによる通知に関する説明です。

スクロールアップし、最後まで記載内容をご確認ください。

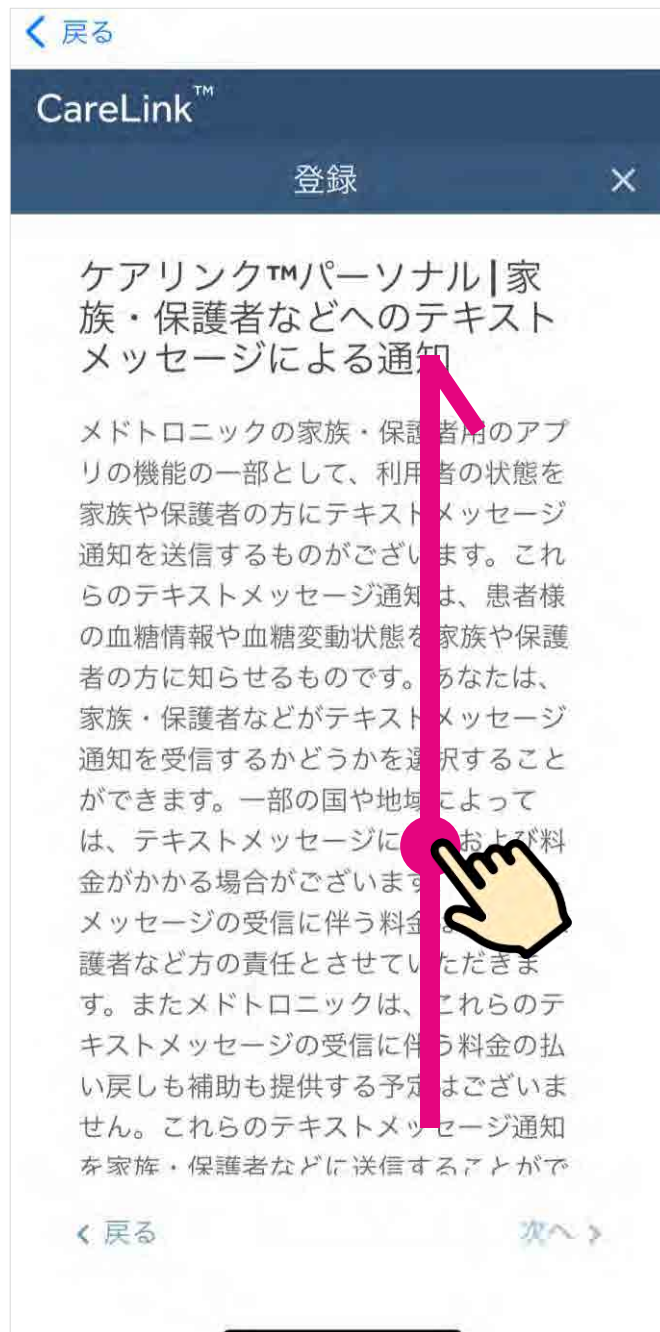

27

ケアリンク™パーソナルへの登録を行う

最後まで内容を確認し、同意したら「はい」「次へ」の順でタップしてください。

< 戻る

登録 ×

なお、こちらの同意は任意であり、同意した場合でもケアリンク™パーソナルアカウントの設定からいつでも撤回することができます。「いいえ」を選択される場合も、ケアリンク™パーソナルへのアクセスが停止されたり、妨げられたりすることはありません。

個人情報(健康データを含む)の処理方法の詳細については、メドトロニックの「[プライバシーステートメント](#)」をお読みください。

メドトロニックが個人情報(医療情報を含みます)を処理し、家族・保護者などへテキストメッセージを送信することを許可しますか？

はい

いいえ

< 戻る

次へ >

28

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

ケアリンク™パーソナルにログインする際のユーザIDとパスワード、メールアドレスを設定します。

ご登録情報の入力の際は、半角での入力が必須です。入力方法をキーボード入力に変更して入力することを推奨します。

< 戻る

CareLink™

登録 ×

ログイン情報

ユーザID*

新しいパスワード*

パスワードの強度:
8文字以上

新しいパスワードの確認*

電子メールアドレス*

2段階検証のためのコードを電子メールアドレスに送信します。

< 戻る 次へ >

29

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

パスワードは、以下の8つの条件を満たす必要があります。

1. 長さが8文字以上
2. 小文字が1つ以上含まれている
3. 大文字が1つ以上含まれている
4. 特殊文字!"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~が1つ以上含まれている
5. 数字が1つ以上含まれている
6. よく使用される用語やフレーズを含まない
7. 氏名やユーザIDを含まない
8. 最近使用されたパスワードでない

※「12345678」などパスワードとして弱すぎるものは設定できません。

メールアドレスはキャリアメールではなく、日常的に使用しているパソコンのメールアドレスを設定してください。

@以下が、以下で構成されるメールアドレスに代表されるキャリアメールのアドレスは製品を使用するための重要なお知らせを受け取れない可能性がありますので推奨されません。



キャリアメールの例：

- × xxxxxxxx@docomo.ne.jp
- × xxxxxxxx @ezweb.ne.jp
- × xxxxxxxx @softbank.ne.jp

パソコンのメールアドレスをご設定ください。



推奨されるメールアドレスの例：

- xxxxxxxx@gmail.com
- xxxxxxxx@yahoo.co.jp など

30

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

ユーザIDを入力して下さい。

ユーザIDはご自身が覚えやすいものをご自由に設定いただけます。

すでにほかのユーザによって使用されているIDは設定できませんので、その場合はほかのIDをご検討ください。

< 戻る

CareLink™

登録 ×

ログイン情報

ユーザID *

新しいパスワード *

パスワードの強度：
8文字以上

新しいパスワードの確認 *

電子メールアドレス *

2段階検証のためのコードを電子メールアドレスに送信します。

< 戻る 次へ >

31-1

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

パスワードを設定します。

レニーのワンポイントアドバイス

パスワードは先ほどご紹介した8つの条件を満たす必要があります。8つの条件を再度確認する場合は、パスワード入力箇所の右側の「**i**」のアイコンをタップすると確認することが可能です。

1. 長さが8文字以上
2. 小文字が1つ以上含まれている
3. 大文字が1つ以上含まれている
4. 特殊文字!"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~が1つ以上含まれている
5. 数字が1つ以上含まれている
6. よく使用される用語やフレーズを含まない
7. 氏名やユーザIDを含まない
8. 最近使用されたパスワードでない



< 戻る

CareLink™

登録 ×

ログイン情報

ユーザID*
Medtronic0123

新しいパスワード*
●●●●●●●● 

パスワードの強度:
 強い

新しいパスワードの確認*
..... 

電子メールアドレス*
.....

2段階検証のためのコードを電子メールアドレスに送信します。

< 戻る 次へ >

31-2

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

パスワード入力中、入力されている文字数が8文字未満の場合は、入力欄が赤枠になり、「短すぎます。8文字以上必要です。」というメッセージが表示されます。

8文字以上入力したにもかかわらずパスワード入力欄が赤枠のままの場合は、先にお示しした8つの条件のいずれかが満たされていないことを表します。パスワード入力欄右の「**i**」をタップし、パスワードの8つの条件をご確認ください。

CareLink™ 登録

ログイン情報

ユーザID*
Medtronic0123

新しいパスワード*
●●●●

短すぎます。8文字以上必要です*

パスワードの強度

新しいパスワード

電子メールアドレス*

2段階検証のためのコードを電子メールアドレスに送信します。

< 戻る

CareLink™ 登録

ログイン情報

ユーザID*
Medtronic0123

新しいパスワード*
●●●●●●●●

パスワードの強度

新しいパスワード

電子メールアドレス*

2段階検証のためのコードを電子メールアドレスに送信します。

< 戻る

31-3

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

現在満たされている条件は緑色で、満たされていない条件は赤色で記載されています。
条件をすべて満たすよう、パスワードを設定してください。

パスワードがすべての条件を満たすと、パスワード入力欄の赤枠が消え、パスワードの8つの条件の文字色はすべて緑色に変わります。

レニーの ワンポイントアドバイス

こちらの例では、

- ①大文字が1つ以上
- ②特殊文字が1つ以上
- ③数字が1つ以上

という3つ条件が赤字になっているので、現在入力している



パスワードに
大文字・特殊文字・
数字を追加すれば良い、ということ
を示しています。

CareLink™ 登録

ログイン情報

ユーザID*
Medtronic0123

新しいパスワード*
●●●●●●

パスワードは以下の条件を満たす必要があります

- ❌ 長さが8文字以上
- ❌ 小文字が1つ以上含まれていない
- ❌ 大文字が1つ以上含まれていない
- ❌ 特殊文字「#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~」が1つ以上含まれていない
- ❌ 数字が1つ以上含まれていない
- ✅ よく使用される用語やフレーズを含むことはできません
- ✅ 氏名やユーザIDを含むことはできません
- ✅ 最近使用されたパスワードは使用できません

< 戻る 次へ >



CareLink™ 登録

ログイン情報

ユーザID*
Medtronic0123

新しいパスワード*
●●●●●●

パスワードは以下の条件を満たす必要があります

- ✅ 長さが8文字以上
- ✅ 小文字が1つ以上含まれています
- ✅ 大文字が1つ以上含まれています
- ✅ 特殊文字「#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~」が1つ以上含まれています
- ✅ 数字が1つ以上含まれています
- ✅ よく使用される用語やフレーズを含むことはできません
- ✅ 氏名やユーザIDを含むことはできません
- ✅ 最近使用されたパスワードは使用できません




< 戻る 次へ >

32

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

パスワードの再入力を行います。

レニーのワンポイントアドバイス

パスワード入力欄右の目のアイコン「」をタップすると、アイコンが「」から「」に変わり、入力した文字列が表示され、同じパスワードが入力されているか確認することができます。



戻る

CareLink™

登録

ログイン情報

ユーザID*
Medtronic0123

新しいパスワード*
●●●●●●●●

パスワードの強度：
強い

新しいパスワードの確認*
●●●●●●●●

電子メールアドレス*
2段階検証のためのコードを電子メールアドレスに送信します。

戻る 次へ

33

ケアリンク™パーソナルへの登録を行う

メールアドレスを入力します。

メールアドレスはキャリアメールではなく、日常的に使用している**パソコンのメールアドレス**を入力してください。



@以下が、以下で構成されるメールアドレスに代表されるキャリアメールのアドレスは製品を使用するための重要なお知らせを受け取れない可能性がありますので推奨されません。

- × xxxxxxxx@docomo.ne.jp
- × xxxxxxxx @ezweb.ne.jp
- × xxxxxxxx @softbank.ne.jp



パソコンのメールアドレスをご設定ください。
推奨されるメールアドレスの一例：

- xxxxxxxx@gmail.com
- xxxxxxxx@yahoo.co.jp など

CareLink™

登録

ログイン情報

ユーザID*
Medtronic0123

新しいパスワード*
●●●●●●

パスワードの強度：
強い

新しいパスワードの確認*
●●●●●●

電子メールアドレス*
xxxxxxx@gmail.com

2段階検証のためのコードを電子メールアドレスに送信します。

< 戻る

次へ >

34

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

すべての項目の入力が終わったら、「次へ」を
タップします。

CareLink™
登録

ログイン情報

ユーザID*
Medtronic0123

新しいパスワード*
●●●●●●

パスワードの強度:
強い

新しいパスワードの確認*
●●●●●●

電子メールアドレス*
xxxxxxx@gmail.com

2段階検証のためのコードを電子メールアドレス
に送信します。

< 戻る

次へ >

35

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

続いて、患者情報の入力です。

アスタリスク「*」がついている4項目（名、姓、郵便番号、電話番号）は必須です。

それ以外の項目は可能な範囲で入力してください。

次のページ以降で1つずつご説明いたします。

The screenshot shows a mobile application interface for CareLink registration. At the top, there is a blue header with a back arrow and the text '戻る' (Back), the CareLink logo, and a '登録' (Register) button with a close 'X' icon. Below the header, the section is titled '患者情報' (Patient Information). The form contains several input fields: '名*' (Name), '姓*' (Surname), 'ミドルネームまたはイニシャル' (Middle name or initial), '性別' (Gender) with a dropdown arrow, '年齢の範囲' (Age range) with a dropdown arrow, and '糖尿病の型' (Type of diabetes) with a dropdown arrow. At the bottom of the form, there are two buttons: a back arrow with '戻る' (Back) and a '送信' (Send) button with a right arrow.

36

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

患者情報の入力について順に説明します。

まず、必須項目の「名」「姓」を入力します。

ミドルネーム（あれば）、性別、年齢の範囲、糖尿病の型は可能な範囲でご入力ください。

レニーのワンポイントアドバイス

「名」「姓」の順番にご注意ください。
例えばメドトロ太郎さんの場合、
「太郎」「メドトロ」の順に入力します。



< 戻る

CareLink™

登録 ×

患者情報

名=ファーストネーム(下の名)

姓=ラストネーム(苗字)

ミドルネームまたはイニシャル

性別

年齢の範囲

糖尿病の型

< 戻る 送信 >

37

ケアリンク™ パーソナル への登録を行う

治療法は可能であればご入力ください。

連絡先項目の「郵便番号」「電話番号」は必須項目です。

市・住所は可能な範囲でご入力ください。

戻る

CareLink™

登録 ×

治療法

連絡先

市

国または地域

郵便番号*

住所

電話番号*

+81 00 0000 0000

戻る 送信

38

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

入力が完了したら、「送信」をタップします。

< 戻る

CareLink™

登録 ×

123-4567 ⓘ

住所

電話番号*

+81 ▼ 123-456-7890

テキストメッセージ通知

- 標準のテキストメッセージ料金が適用される場合があります
- SMSテキストベンダーの所在地は米国です
- SMSテキストは暗号化されていない形式で海外に送信されます

プライバシーステートメント

< 戻る

送信 >



39

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

ご自身で入力したメールアドレスに、検証コードが記載されたメールが送信されました。

登録したメールアドレスに届いたメールを開封します。

[< 戻る](#)

CareLink™

本人確認

検証コードが電子メールアドレスに送信されました
xxxxxxx@gmail.com

検証コード

私はロボットではありません

reCAPTCHA
プライバシー - 利用規約

[検証コードが届かない場合](#)

40

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

登録したメールアドレスに「ケアリンク™パーソナル
検証コード」という件名のメールが届いています。


開封し、6桁の検証コードを確認してください。

レニーのワンポイントアドバイス

メールで送信された検証コードの検証時間（有効期限）は15分です。
15分以内にアプリへの入力と送信（④①～④③）を完了させて下さい。



検証時間を超えた場合は一旦アプリに戻り、「検証コードが届かない場合」よりコードの再発行を行います。

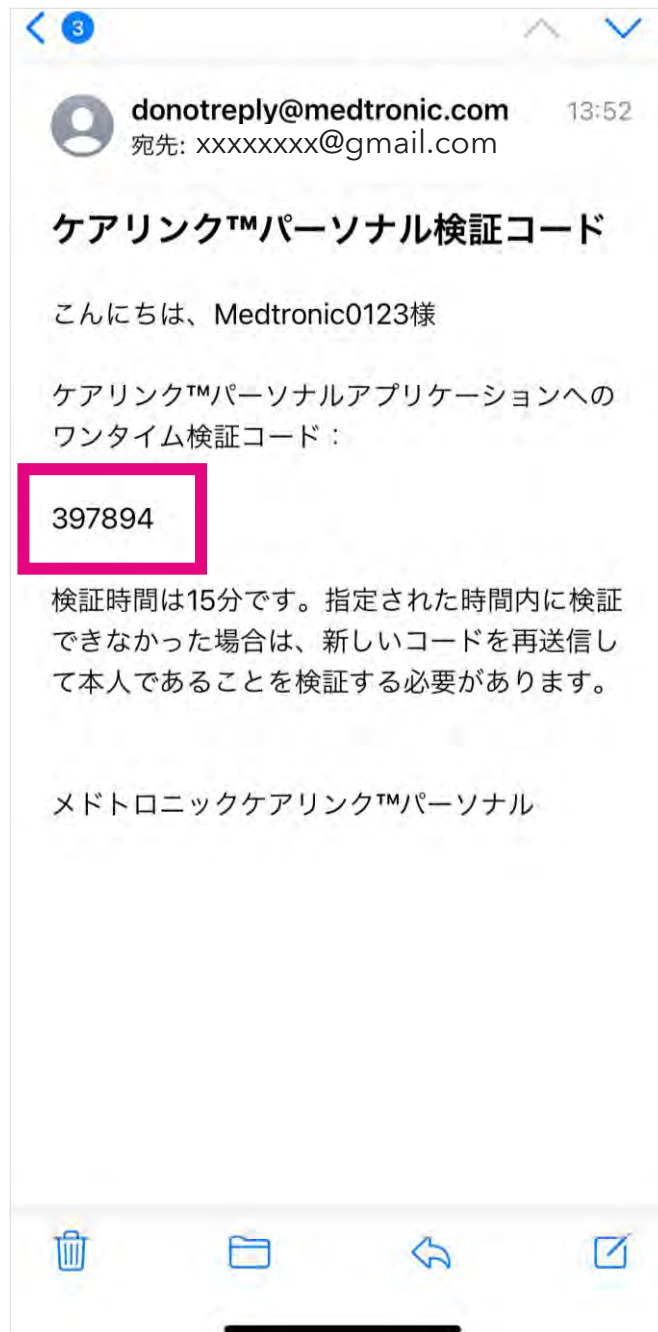

41

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

6桁の検証コードを入力します。

(3桁 - 3桁の形に自動で変換されます。)

入力した検証コードが正しいことを確認したら、
「私はロボットではありません」の左の□を
タップしてください。

< 戻る

CareLink™

本人確認

検証コードが電子メールアドレスに送信されました
xxxxxxx@gmail.com

検証コード
397-894

私はロボットではありません

reCAPTCHA
プライバシー・利用規約

検証コードが届かない場合

42

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

Google reCAPCHAが作動します。

画面の指示に従って、クイズに回答してください。

これは登録作業をしているのがロボットではないことを確認するためのステップです。

※右の例は表示された写真の中から自転車の写真を探すというものですが、クイズの内容や形式は都度変わります。



43

ケアリンク™パーソナル への登録を行う

ケアリンク™パーソナルの登録が完了しました。

「続行」をタップします。



44

ケアリンク™パーソナル にログインする

先ほどケアリンク™パーソナルの登録時に決めた
ユーザIDとパスワードを入力します。

完了

CareLink™

ログイン先
CareLink™

ユーザID

パスワード

ログイン

[パスワードを忘れた方](#)

45

ケアリンク™パーソナル にログインする

入力内容が正しいことを確認し、ログインを
タップします。

完了

CareLink™

ログイン先
CareLink™

ユーザID
Medtronic0123

パスワード
●●●●●●●●●●●●●● 


ログイン

[パスワードを忘れた方](#)



46

ケアリンク™パーソナル にログインする

パスワードの入力内容を確認したい場合はパスワード入力欄右の「」をタップします。

ユーザIDは④⑩で受信したメール冒頭に記載されています。

パスワードを忘れた場合はログインボタン下の「パスワードを忘れた方」をタップします。

完了

CareLink™

ログイン先
CareLink™

ユーザID
Medtronic0123

パスワード
Eb7sAM#Y



ログイン

パスワードを忘れた方

47

ケアリンク™パーソナル にログインする

初回ログイン時のみ、ミニメド™モバイルのエン
ドユーザライセンス契約が表示されます。

スクロールアップして、記載内容を最後までご
確認ください。

ミニメド™モバイル

エンドユーザライセンス契約

ユーザ向けの通知：本契約は、MiniMed™モバイルアプリに加え、関連文書、更新およびアップグレード(以下総括して「本ソフトウェア」という)に関して、ユーザ(個人または法人、以下「ユーザ」という)とMedtronic MiniMed, Inc. (“Medtronic”)との間で締結される法的契約です。本ソフトウェアは、互換性のあるハードウェア(例：一部のMedtronic製インスリンポンプ)(「本製品」)のみと併用する目的で、Medtronicおよびその供給業者から提供されています。本ソフトウェアを使用する前に、本契約の条件を確認し、それに同意する必要があります。本契約の規定に同意しない場合は、本ソフトウェアを使用することはできませんので、直ちに使用を中止してください。

1. **ライセンスの付与** Medtronicは、ユーザが本製品および本ソフトウェアを正当に取得し、それらを本ソフトウェアと本製品のユーザガイドに記載されている方法で使用している場合、ユーザに本製品と本ソフトウェアを使用するための限定的、非独占的、取消可能な、譲渡禁止、移転禁止ライセンスを付与します。

2. **その他の権利および制限** ユーザは、本ソフトウェアの複製、改造、構成品の分離、翻案、もしくは、本ソフトウェアを他の方法で派生物の作成を行わないこと、本ソフトウェアをエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、または他の方法で本ソフトウェアのソースコード特定を認めないことに同意します。ユーザは、第三者に本ソフトウェアの貸与、リース、頒布、または賃貸を行うことはできません。ユーザは、個人または組織を傷つけたり脅迫したり嫌がらせしたりするために本ソフトウェアまたは本製品を使用しないことに同意します。また、Medtronicサービス(またはMedtronicサービスに接続されたネットワークあるいはデバイス)に損傷、過重負担、干渉を与えたり、使用不能にしたりすることに同意します。さらに、本契約

同意する


ことに同意します。

48

ケアリンク™パーソナル
にログインする

最後まで確認したら「同意する」をタップします。

ミニメド™モバイル	
Joda-Time	http://www
reactive-streams	http://www
javax.inject	http://code.
swagger-annotations	https://githu -Annotation
blurry	https://githu
Dagger	https://githu
Gson	https://githu
SLF4J API Module	http://www
rootbeer	https://githu
logback-android	https://githu
OkHttp	http://squar
javax Annotation API	http://jcp.or
SQLCipher	https://www
Apache Oltu - OAuth 2.0 - Client	https://oltu.
同意する	




49

ケアリンク™パーソナル にログインする

同意の再確認が表示されます。

「同意する」をタップします。

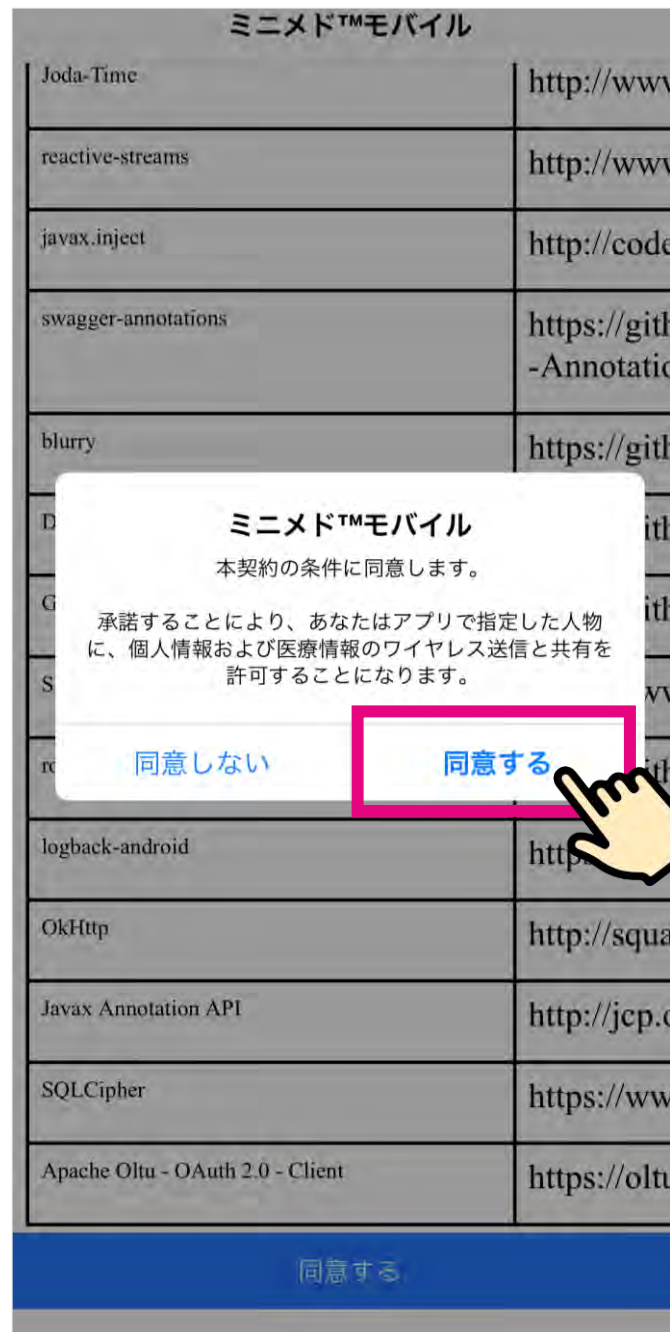

50

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う

アプリ画面に遷移します。

- ① ミニメド™770Gインスリンポンプ
- ② モバイル機器（今アプリを操作しているスマートフォン等）のBluetooth®設定をオンにします
- ③ モバイル機器がインターネットに接続できる状況であること

を確認します。



51

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う

「はい、ポンプにはこの記号がついています」
をタップします。



52

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う

インスリンポンプが二つ並んだ画面が表示されます。

右の、メニューがリストで表示されているほうのポンプの下の「選択」をタップしてください。

レニーのワンポイントアドバイス

指紋認証やFace IDなど、スマートフォンのロックがかかっていない場合、ロックを設定するようメッセージがでます。

お使いの端末の画面ロックを設定してください。ロックの設定は、「設定」アプリの「セキュリティ」より設定ができる端末が多いです。



53

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う

「MiniMed™ Mobile」アプリの通知許可が表示されます。

「許可」を選択します。

レニーのワンポイントアドバイス



通知の有無や方法は後から変更できます。

通知の設定方法はほかの一般的なアプリと同様です。

詳しい設定方法は、ご使用のモバイル機器の取り扱い説明書をご確認ください。



54

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う

Bluetooth®の使用を確認します。

「OK」をタップします。

レニーのワンポイントアドバイス

Bluetooth®をオンにしないとポンプからの通知やセンサグルコース値、アラートなどをリアルタイムで受信することができません。

アプリ使用中はお使いのモバイル機器のBluetooth®設定をオンにしてください。



55

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う

次はミニメド™770Gインスリンポンプの操作です。

画面に従ってインスリンポンプを操作します。
アプリは閉じず、そのままにしておきます。

戻る ミニメド™モバイル




ポンプでの操作：

1. 「オプション」を選択します (MM770Gでない場合は省略)
2. 「ユーティリティ」を選択します
3. 「接続機器オプション」を選択します
4. 「機器のペアリング」を選択します
5. 「検索」を選択します
6. 「Mobile 624912」を選択します
7. 「確認」を選択します

診断ログ

56

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う

インスリンポンプの選択ボタン「」を押し、メニューを表示します。



57

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う


メニューより下矢印「▼」を押し、

「オプション」まで黄色のハイライトを合わせます。



58

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う



「オプション」を選択した状態で選択ボタン「」を押します。



59

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う

オプションメニューが開きます。

下矢印「」を押し、「ユーティリティ」に黄色のハイライトを合わせ、選択ボタン「」を押します。



60

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う

ユーティリティのメニューより下矢印「▼」を押し、「接続機器オプション」に黄色のハイライトを合わせ、選択ボタン「○」を押します。



61

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う

下矢印「▼」で「機器のペアリング」に黄色のハイライトを合わせ、選択ボタン「○」を押します。



62

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う

選択ボタン「○」を押し、検索を開始します。

レニーのワンポイントアドバイス



周囲にBluetooth®を使用している機器がある場合、接続がうまく完了できないことがあります。

うまく接続できない場合は、ワイヤレスイヤホンなどの周囲のBluetooth®機器の電源をお切りになり、再度お試しくださいをお勧めします。



63

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う

ご使用のインスリンポンプにペアリングされている機器が表示されます。

レニーのワンポイントアドバイス

お使いのポンプとペアリングしている機器がある場合、

- 測定器（血糖自己測定器）
- CGM（トランスミッタ）

の番号も表示されます。



64

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う

下矢印「▼」を押してMobileに黄色のハイライトを合わせます。

Mobileの欄に

アプリの「ポンプでの操作」6に表示されている番号と同じ番号が表示されていることを確認し、選択ボタン「○」を押します。



戻る ミニメド™モバイル ?

ポンプでの操作：

1. 「オプション」を選択します (MM770Gでない場合は省略)
2. 「ユーティリティ」を選択します
3. 「接続機器オプション」を選択します
4. 「機器のペアリング」を選択します
5. 「検索」を選択します
6. 「Mobile 624912」を選択します
7. 「確認」を選択します

診断ログ

65


アプリの設定とポンプとのペアリングを行う

ポンプ画面で

タイプ：モバイル機器

シリアル番号：Mobile アプリと同じ番号

が表示されていることを確認したら、

「確認」に黄色のハイライトを合わせた状態で、
選択ボタン「」を押します。



66

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う

モバイル端末にペアリング要求が表示されます。

「ペアリング」をタップします。

レニーのワンポイントアドバイス

「Bluetooth®ペアリングの要求」画面は使用する機種によって異なります。

特にアンドロイド端末をお使いの場合は右の画像と表示が大きく異なることがありますのでご了承ください。



67

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う

ポンプ画面・モバイル端末画面に「ペアリング中...」が表示されます。



68

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う

ポンプ画面が「検索中…」に変わります。



69

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う

無事ペアリングが完了すると、ポンプ画面に「ペアリング成功」と表示されます。



70

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う

モバイル端末にもペアリング成功の案内が表示されます。

表示されたポンプのシリアルナンバーが正しいことを確認して、「次へ」をタップします。



71

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う



ペアリングがうまくできないときは…


1. ポンプ画面が「ペアリング中…」または「検索中…」になっていることをご確認ください。ポンプ画面が「機器の確認」になっている時は、67よりやり直してください
2. ポンプとスマートフォンは離れすぎていませんか？Bluetooth®で相互に認識できるように、近くに置いて、再度お試しください
3. 周囲にBluetooth®がオンになっている機器がある場合、ポンプとスマートフォンの通信に干渉する可能性があります。ポンプ・スマートフォン以外のBluetooth®をオフにするか、遠ざけてください
4. 他人のイヤホンやタブレットなど、ご自身で把握していないBluetooth®デバイスが存在する可能性があります。場所を変えてお試しくださいと、うまくいくこともあります

72

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う

ミニメド™モバイルの使用に関する警告です。

内容をよく読み、「OK」をタップします。

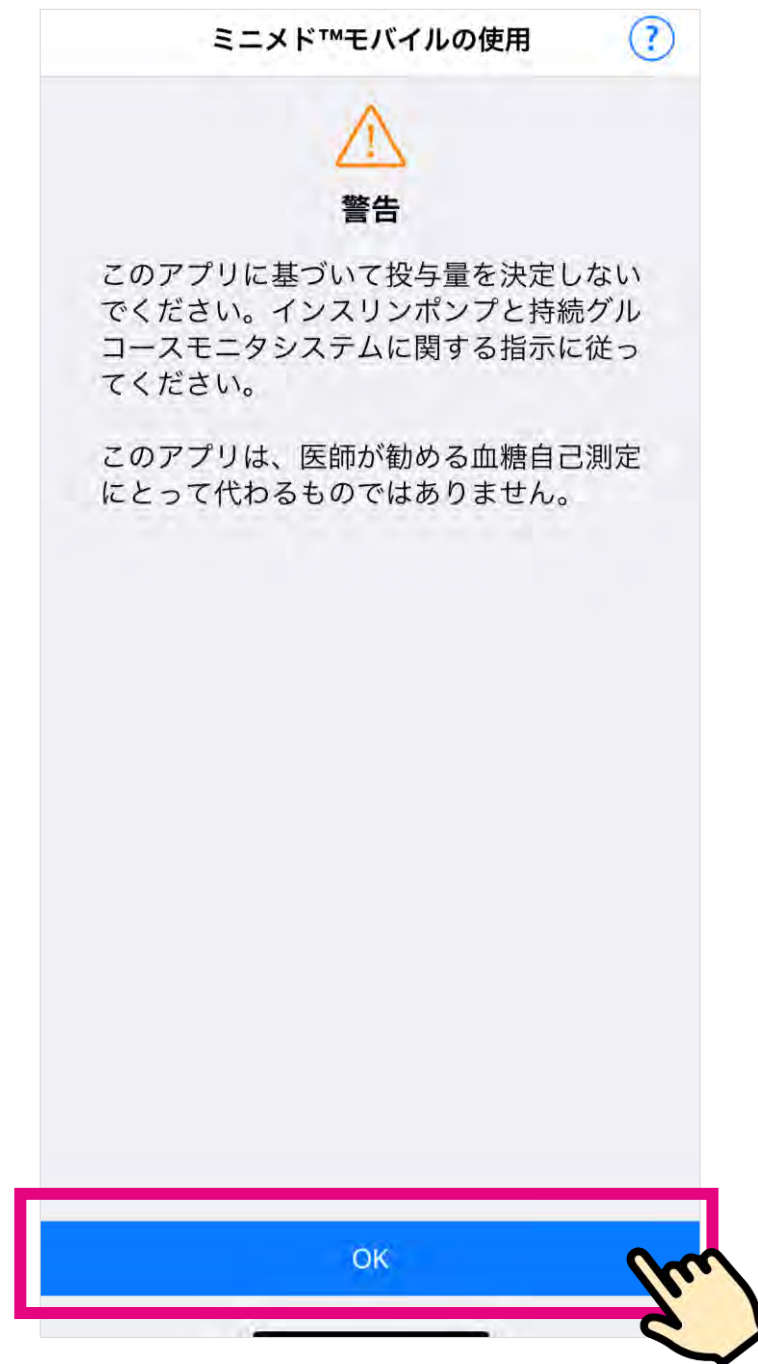

73

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う

再度、ミニメド™モバイルの使用に関する警告についての確認が求められます。

- アプリに基づきインスリン投与量の決定をしないこと
- アプリは血糖自己測定にとって代わるものではなく、あくまで患者さんの糖尿病と共にある生活をサポートするツールであること

をご理解いただいた場合は「同意する」をタップして下さい。




74

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う

通知設定を行います。

はじめてアプリをお使いの際は、どちらもオンにさせていただくことをお勧めします。

通知の設定は後から変更可能です。

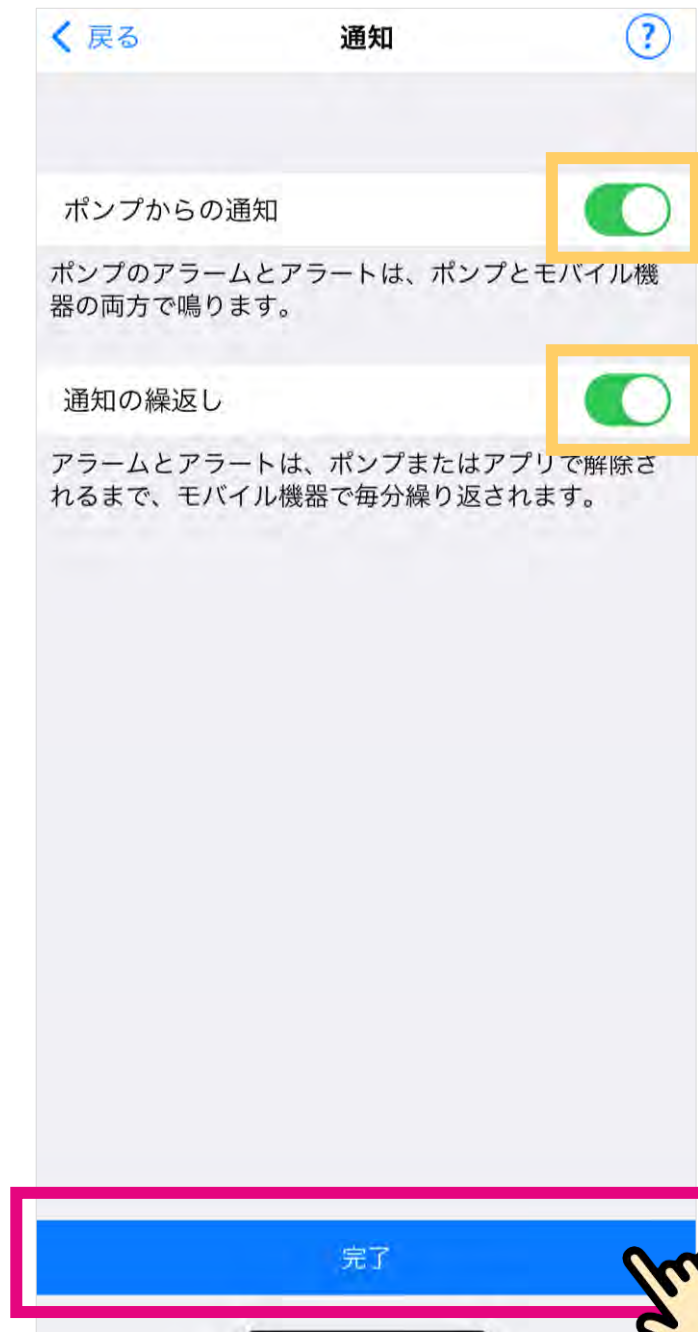

75

アプリの設定とポンプとのペアリングを行う

ポンプからの通知をオンにすると、アラームやアラートが鳴動した際、ポンプで解除する必要があります。

アプリではなくポンプでのアラーム・アラート解除の必要性をご確認いただき、「OK」をタップして下さい。




76

アプリを使用する

以上でアプリの設定は完了です。

アプリがポンプに接続し、データの読み込みを行います。

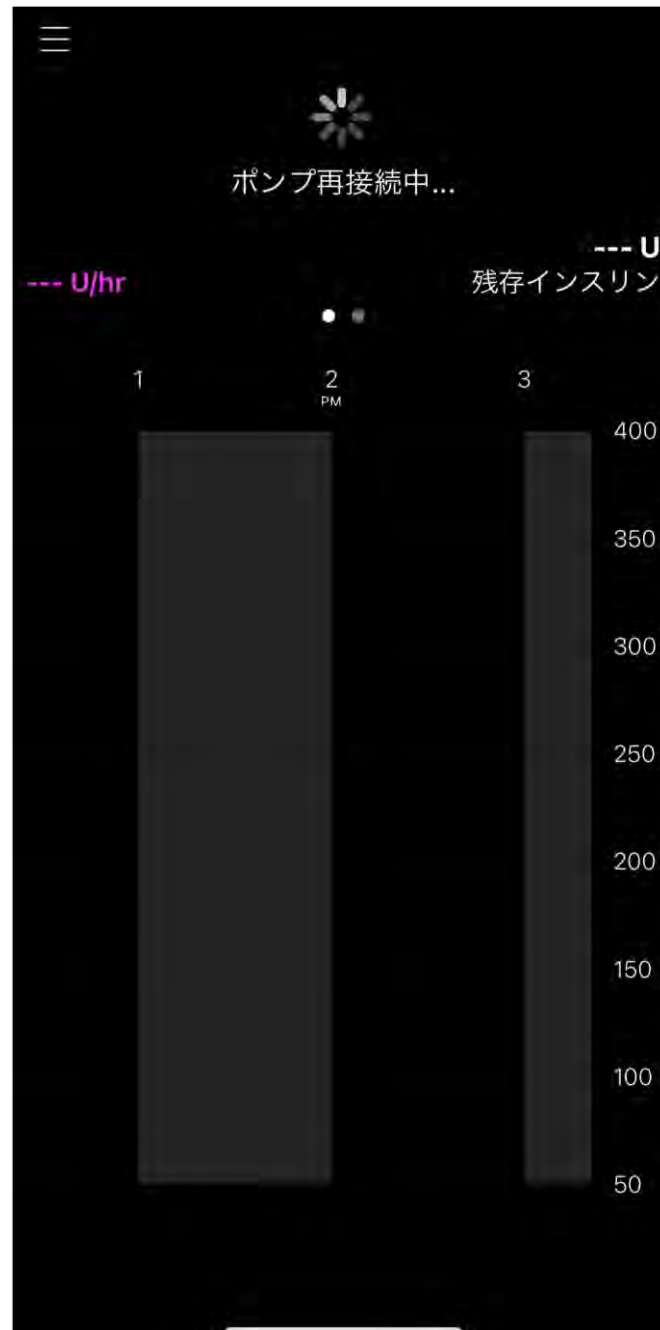

77

アプリを使用する

快適にご使用いただくためのワンポイント：

1. ご使用の際は、バックグラウンドでアプリを立ち上げたままにしておきましょう
2. 病院とリンクしている場合は、診察日前にデータのアップロードを行いましょ

最後に確認！




《データのアップロード方法》



画面左上の
三本線のマークを
タップします



「ケアリンク™
との同期」を
タップします

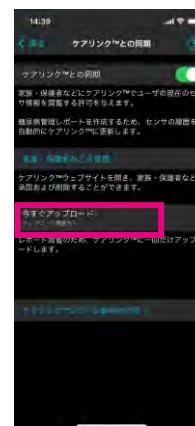

「今すぐ
アップロード」を
タップします

LINE 公式アカウント ユーザー用メドトロニックダイアビーティス



タイムリーな
製品・安全情報

メニューで
簡単操作

電話サポート

友達登録はこちらから！



本サービスの利用は、弊社の糖尿病関連製品を使用中の患者さん又はそのご家族の方に限ります。それ以外の方は利用できません。必ず本サービスの利用規約を確認の上、利用をお願い致します。


お困りの時は



日本メドトロニック24時間サポートライン

0120-56-32-56 (24時間365日)

- インスリンポンプやCGM、アプリの使用方法でお困りの場合
- ミニメド™ モバイルアプリの設定方法についてお問い合わせの際は、本資料をお手元にご用意の上お電話をお願い致します

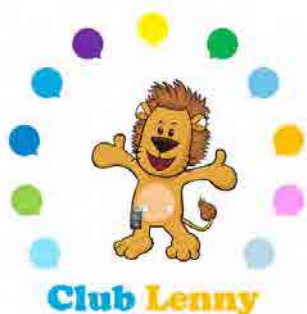

Club Lennyとハロー！レニーに登録しましょう



www.medtronic.com/clublenny

- 製品をより安全に、安心しえお使いいただくためのメール配信サービスです
- 製品の使用を開始する際、できるだけ速やかにご登録をお願い致します
- すでに使用を開始されている方も、同様にご登録をお願い致します

Medtronic

日本メドトロニック株式会社
ダイアビータイス
〒108-0075 東京都品川区港南1-2-70

medtronic.co.jp

販売名：メドトロニック ミニメド 700シリーズ 医療機器承認番号：30300BZX00256000
© 2023, 2023 Medtronic.

Medtronic、メドトロニック及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。

TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。

Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。

DIAB2212-01 rev.2