

Oxisensor™ III

Nellcor™ SpO₂ sensors with OxiMax™ technology

● 手指への装着方法


D-25 (L)

推奨適用体重 30kg以上



D-20

推奨適用体重 10~50kg

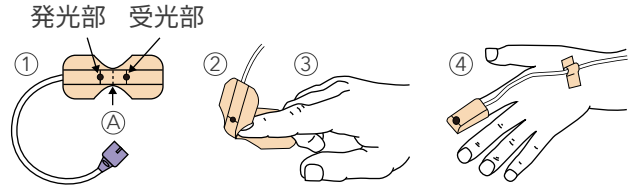

- ① 台紙(半透明シート)をはがす前に、点線(A)を中心にしてあらかじめ折り曲げてください
- ② 発光部(ケーブル側)を爪側に、受光部(ケーブルなし側)を指の腹側に装着します
- ③ 台紙をはがし、点線(A)を指先の中央にあて、発光部と受光部側が向き合うようにし、先に受光部側(指の腹側)、次に発光部側(爪側)を締めつけないように貼ります
- ④ ケーブルの途中をサージカルテープなどで固定すると体動の影響を受けにくくなります


ご使用上の注意

1. 発光部を爪側、受光部を指の腹側に装着します
これにより外部光による干渉を最小限に抑えることができます
2. 圧迫しないように注意して装着してください
測定値が低く出る場合は、静脈性拍動の影響あるいは循環障害が考えられます
3. 強く巻きすぎたり上から他のテープで巻いたりすると、静脈性拍動をおこしSpO₂値が不正確になることがあります
4. 測定部位を確認してください
少なくとも8時間毎に1回は装着部位を観察し、発赤の有無や皮膚の保清などの状態を確認してください
また必要に応じて装着部位を変更してください
5. 同一患者においては、発光部と受光部の粘着性が損なわれな限り、再装着は可能です



N-25

推奨適用体重 40kgを超える

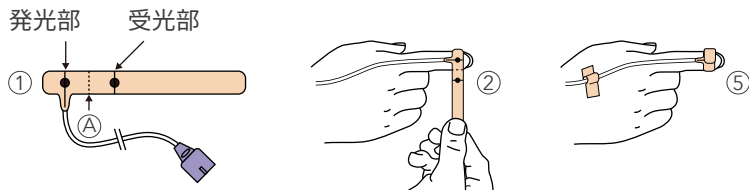

- ① 台紙(半透明シート)をはがす前に、点線(A)を中心にしてあらかじめ折り曲げてください
- ② 発光部(ケーブル側)を爪側の第一関節の先、受光部を指の腹側に装着します
その際、関節の上に装着しないよう注意してください
- ③ 台紙をはがし、点線(A)を中心に発光部と受光部が向き合うように密着させ貼りつけます
- ④ センサのテープ部分を引き伸ばさないようにして、軽く巻きつけます
- ⑤ ケーブルの途中をサージカルテープなどで固定すると体動の影響を受けにくくなります

※N-25のご使用上の注意については裏面をご参照ください


Oxisensor™ III

Nellcor™ SpO₂ sensors with OxiMax™ technology

● 足指への装着方法


N-25

推奨適用体重 3kg未満

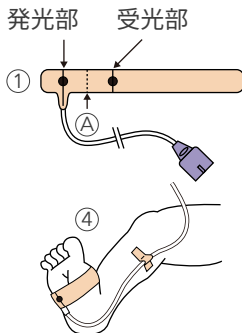

I-20


推奨適用体重 3~20kg

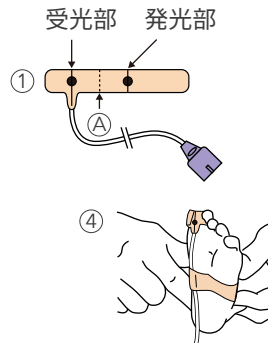

- ① 台紙(半透明シート)をはがす前に、点線(A)を中心にしてあらかじめ折り曲げます
- ② 台紙をはがし、点線(A)を中心に発光部と受光部が向き合うように密着させて貼りつけます
※ I-20を指に装着する際は、発光部(ケーブルがない方)を爪側に貼りつけてください
- ③ センサのテープ部分を引き伸ばさないようにして、軽く巻きつけます
- ④ ケーブルの途中をサージカルテープなどで固定すると体動の影響を受けにくくなります
※ I-20は、テープが同梱されています

ご使用上の注意

1. 装着部分を圧迫しないよう注意して装着してください
 - センサのテープ部分は軽度の伸縮性を持っています
これを引き伸ばして貼りつけると、装着部位を圧迫して循環障害などの原因となる可能性があります
 - 強く巻きすぎたり上から他のテープで巻いたりすると、静脈性拍動をおこしSpO₂値が不正確になることがあります
 - 測定値が低く出る場合は、圧迫による静脈性拍動の影響や循環障害が考えられます
上記①・②に準じて圧迫がないか確認してください
2. センサのテープ部分の粘着力が低下したら、付属の円形両面テープ(ドット)を使用してください
※ センサの粘着がない状態では、測定精度が低下することが考えられます
 - 発光部と受光部に1枚ずつ貼ります
 - さらに粘着が低下したら、前に貼りつけたテープをはがさずに重ねて貼ります(片側3枚まで)

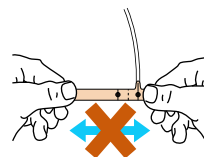

3. 測定部位を確認してください
成人では少なくとも8時間毎、特に小児・新生児では、装着部位を観察し、発赤の有無や皮膚の保清などの状態を確認してください
また必要に応じて装着部位を変更してください
4. 同一患者においては、発光部と受光部の粘着性が損なわれない限り、再装着は可能です

販売名 ネルコアオキシセンサIII
医療機器届出番号 13B1X00069PS006A

Medtronic

製造販売元
コヴィディエンジャパン株式会社
Tel: 0120-998-971
medtronic.co.jp

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては
製品の電子添文をご参照ください。

© 2015-2022 Medtronic. Medtronic及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。
TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。

mt-po-oxis(m7)2301
RMS_2021_0905-A-3