

# Medtronic

## 乐享生活， 健康无忧

借助 LINQ II™ 系统，您的医生可以  
随时监测您的心脏健康状况，  
确保您乐享生活

LINQ II™ 植  
入式心脏监  
测系统

Medtronic LINQ II™





## 什么情况下可能需要长期监测心脏健康状况？

如果您有可能由心跳异常引起的症状，您的医生可能会建议您使用心脏监测器。

然而，心跳异常可能很难诊断。心跳异常可能很少发生，而且您可能感觉不到心跳异常。

**针对这一问题，现在有一种解决办法。**植入式监测器可以监测您的心脏是否存在心率不齐的情况，提供全天候监测服务，而不会给您的日常活动带来任何影响。

**这可以帮助您的医生判断您的症状是否由心脏健康状况引起，从而进行对症治疗。**

# 长期监测心脏健康状况 可能会改善以下情况

## 不明原因晕厥

您反复经历不明原因昏厥。这种情况也称为“昏倒”或“惊厥”。

- **为什么要监测？** 昏厥可能源于严重起因，包括心跳异常。

## 中风

如果您存在称为房颤的心跳异常状况，那么您发生二次中风的风险就会增加。

- **为什么要监测？** 中风幸存者可能经历过房颤，但并不知道这一情况。监测心脏健康状况可以发现房颤，由此您可以接受对症治疗。

## 房颤

房颤是指心率急促且不规则的情况，也称为“AF”或“AFib”。

- **为什么要监测？** 长期监测您的心脏健康状况可以检查治疗效果。

## 心悸

心悸是指心脏有敲击、快速跳动或扑动的感觉。

- **为什么要监测？** 心悸可能是心跳异常的症状。

# 了解 用于长期监测心脏健康状况的 Medtronic LINQ II 植入式心脏监测器 (ICM)



实际尺寸

LINQ II ICM 是一种植入皮下的小型器械，用于监测您的心脏健康状况，使用寿命长达 4.5 年。<sup>\*1</sup>目前，这款医疗器械尚未在大多数患者中推广使用。

<sup>\*1</sup>标称设置。

# 这是一款非常精确的植入式心脏监测器，值得信赖<sup>2</sup>

## 技术先进

只能通过长期监测才能获知关于您的心脏的一些信息。LINQ II ICM 还可以检测到心跳异常状况，这是其他心脏监测器难以检测到的。

## 使用高效

一次植入等同于佩戴数十个短期心脏监测器。可以加快诊断和治疗速度。<sup>‡</sup>

## 始终监测

借助这款心脏监测器，您的医生可以随时跟踪您的心脏健康状况，确保您乐享生活。

## 方便快捷

借助这款心脏监测器，可以减少您的就医次数。<sup>§</sup>再也不用通过各种医疗器械接受检查。不会给您的日常活动或出行计划带来任何影响。植入式心脏监测器随时随地进行监测，从而减少您自己和看护者的监测工作。

## 操作智能，提供个性化服务


LINQ II ICM 会根据您的具体状况自动向您的医生发送关于您的心脏健康状况的信息。您甚至可以标记症状，以便您的医生可以将您的心跳与您的感觉相对应。

**请咨询您的医生，了解长期监测的风险和益处，并确定 LINQ II ICM 是否适合您。**

<sup>‡</sup>一次植入可持续长达 4.5 年，植入式监测等同于 54 个使用寿命为 30 天的监测器。

<sup>§</sup>与短期监测器比较。

## 植入安全又快速

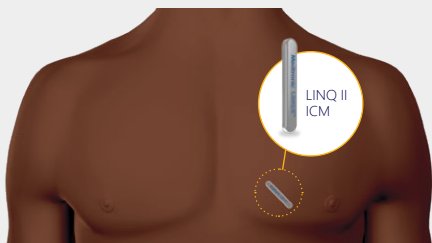

植入 Medtronic 心脏监测器通常只需不到五分钟的时间，且无需对患者进行全麻。这款监测器植入皮下，在门诊即可完成植入手术。不会给您的生活带来任何影响。

## 远程联系您的医生，根据您的具体状况提供个性化服务

植入后，您即可返回家中，借助智能手机应用程序或家用发射器向您的医生发送由 LINQ II ICM 监测的心脏健康状况信息。<sup>Ω</sup>



MyCareLink Heart™  
移动应用程序

或




MyCareLink Relay™ 家用通信器  
(床边装置)

LINQ II ICM 全天候监测并记录心跳异常，确保您可以乐享生活。

您只需确保始终在手机上打开此应用程序或保持床边装置连接即可。然后，您的医生可以在办公室远程访问您的心脏健康状况信息，并且必要时与您联系。

<sup>Ω</sup>有关设置移动应用程序或家用发射器的更多信息，请参阅患者手册。

# 工作原理

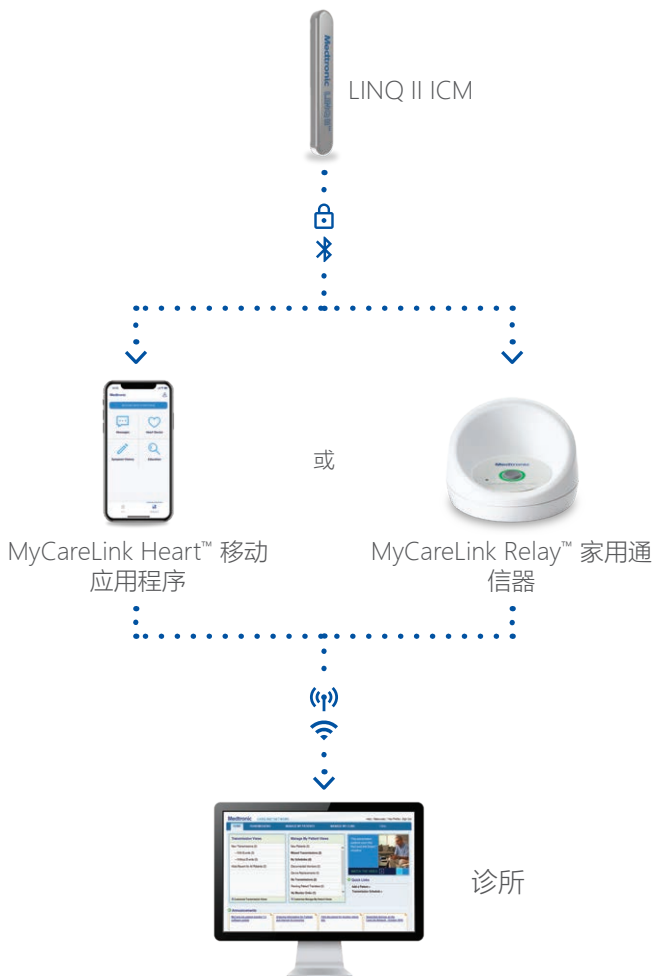

扫描左侧二维码检查您的手机是否与 MyCareLink Heart 移动应用程序兼容，或访问 [MCLHeart.com](http://MCLHeart.com) 开始使用。

如果您使用的是 Apple® 设备，请打开摄像头应用程序并对准左侧二维码扫描。

如果您使用的是 Android™ 设备，请使用二维码阅读器或访问 [MCLHeart.com/download](http://MCLHeart.com/download)。

# 安全

**您可以放心使用这款心脏监测器，因为它具有以下特点：**



## 经临床验证且广受信赖

Medtronic 心脏监测器是经过长期临床研究<sup>4</sup>的小型<sup>3</sup>植入式监测器。已经有超过 150 万人植入 Medtronic 植入式心脏监测器来监测心脏健康状况。<sup>5</sup>



## 数据安全

这款心脏监测器使用 Bluetooth® Low Energy 向您的手机应用程序发送心脏健康状况信息。保护您的数据安全是 Medtronic 的首要任务。这款器械的连接功能可以保护您的数据安全。



## 在 MRI 环境中使用安全<sup>\*\*</sup>

通过将您的器械识别卡提供给成像技术人员，他们可以获得更多信息。



## 在机场安检时使用安全

这款心脏监测器不受机场安检和扫描影响。

<sup>\*\*</sup>有关更多信息，请参阅患者手册。



## 费用和保险范围

Medtronic 植入式心脏监测器由 Medicare 和私人保险公司广泛承保。请咨询您的保险公司进一步了解植入或监测相关费用。



**有疑问？** 有关常见问题和更多信息，请访问 [MonitorYourHeart.com](https://www.monitoryourheart.com)。

## 请咨询您的医生

长期监测心脏健康状况需遵医嘱，并不适合所有人。请咨询您的医生，了解长期监测心脏健康状况是否适合您。您的医生应与您讨论所有可能的获益和风险。虽然很多患者能够从长期监测中获益，但疗效各异。

有关更多信息，请拨打 Medtronic 免费热线  
1-800-551-5544

(美国中部时间星期一至星期五上午 7:00  
至下午 7:00) 或访问 Medtronic 网站  
[Medtronic.com/HeartMonitorISI](https://www.Medtronic.com/HeartMonitorISI)。



## 参考资料

- <sup>1</sup> LINQ II LNQ22 ICM 临床医师手册, M974764A001D。
- <sup>2</sup> ICM 发布的准确度比较指南, 2021 年。
- <sup>3</sup> ICM 尺寸比较指南, Medtronic 存档数据, 2021 年。
- <sup>4</sup> Medtronic Reveal™ 出版物, Medtronic 存档数据, 2022 年。
- <sup>5</sup> Medtronic Reveal™ ICM 系列数据, 存档数据, 2021 年。

## 简要声明

### 关于 Medtronic LINQ II™ 植入式心脏监测系统 (ICM) 和远程监测的重要安全信息

LINQ II 植入式心脏监测器是一种植入式监测系统, 既可由患者启动, 也可自动启动, 可记录皮下 ECG, 适用于以下病例:

- 有临床症状或状况表明其心律失常风险增大的患者
- 出现提示可能患有心律失常的晕眩、心悸、晕厥和胸痛等短暂性症状的患者

此器械尚未专门针对儿科使用进行测试。

与植入 LINQ II 植入式心脏监测器相关的可能风险包括但不限于手术部位感染、器械移位、器械通过皮肤发生腐蚀和/或对器械材料过敏。可与 LINQ II 配合使用的附件可能会遇到连接或性能问题。有关详细信息和故障排除说明, 请参阅产品手册。

LINQ II 植入式心脏监测器的使用需遵医嘱, 并不适合所有人。请咨询您的医生, 了解长期监测心脏健康状况是否适合您。您的医生应与您讨论所有可能的获益和风险。虽然很多患者能够从该产品中获益, 但疗效各异。有关更多信息, 请拨打 Medtronic 免费热线: 1-800-551-5544 (美国中部时间星期一至星期五上午 7:00 至下午 7:00) 或访问 Medtronic 网站: medtronic.com。

Bluetooth® 文字标志和徽标是属于 Bluetooth SIG 的注册商标, Medtronic 公司对此类标志的使用均已获许可。Apple 和 Apple 徽标是 Apple Inc. 在美国以及其他国家/地区注册的商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务商标。Android™ 平台和 Google Play™ 商店是 Google LLC 的商标。Android™ 是 Google LLC 的商标。

©2022 Medtronic。Medtronic、Medtronic 徽标和生命因科技不凡都是 Medtronic™\* 的商标。第三方品牌是其各自所有者的商标。所有其他品牌都是 Medtronic 公司的商标。

请咨询您的医生，了解长期监测是否适合您以及您是否准备好接受植入手术。

有关更多信息，请访问  
[MonitorYourHeart.com](https://MonitorYourHeart.com)

进行注册，以详细了解 LINQ II ICM 是否适合您。



Medtronic  
710 Medtronic Parkway  
Minneapolis, MN 55432-5604  
USA

Toll-free in USA: 800.633.8766  
Worldwide: +1.763.514.4000

[medtronic.com](https://www.medtronic.com)

UC202112083a ZS  
©2022 Medtronic.  
Minneapolis, MN.  
All Rights Reserved.  
Printed in USA.  
05/2022