

Medtronic

Obtenga tranquilidad a largo plazo

El sistema Reveal LINQ™ le permite a su médico obtener información sobre su corazón mientras usted disfruta de la vida

Sistema de monitoreo cardíaco insertable Reveal LINQ™



¿Por qué el monitoreo cardíaco a largo plazo puede ser adecuado para usted?

Si tiene síntomas que podrían deberse a la presencia de latidos cardíacos anómalos, es posible que su médico le recomiende un monitor cardíaco.

Sin embargo, estos latidos anómalos pueden ser difíciles de detectar y diagnosticar. Podrían no producirse de forma regular e, incluso, podría no percibirlos.

Ahora ya hay una manera de hacerlo. Un monitor implantable puede controlar el corazón a fin de detectar irregularidades en los latidos cardíacos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin necesidad de que modifique sus actividades diarias.

Esto le permitirá a su médico entender si el corazón es el causante de los síntomas y poder avanzar hacia el tratamiento.



Afecciones que podrían beneficiarse del monitoreo cardíaco a largo plazo

Desvanecimiento sin explicación

Cuando tiene episodios de desvanecimiento reiteradas veces y no sabe por qué ocurren. También se conoce como "desmayo" o "síncope".

- **¿Por qué se debería monitorear?** El desvanecimiento puede deberse a causas graves, como anomalías en los latidos cardíacos.

Accidente cerebrovascular

El riesgo de padecer otro accidente cerebrovascular aumenta si tiene una afección caracterizada por latidos cardíacos anómalos, denominada fibrilación auricular.

- **¿Por qué se debería monitorear?** Los sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares pueden padecer fibrilación auricular sin saberlo. Gracias al monitoreo cardíaco, es posible detectar esta afección, de modo que usted podría recibir tratamiento.

Fibrilación auricular

Una afección en la que el corazón late de forma muy rápida e irregular. También se denomina "FA" o "FibA".

- **¿Por qué se debería monitorear?** El monitoreo permanente del corazón sirve para comprobar si el tratamiento funciona.

Palpitaciones cardíacas

Una afección en la que siente que el corazón late con fuerza, se acelera o se agita.

- **¿Por qué se debería monitorear?** Las palpitaciones pueden ser un síntoma de los latidos cardíacos anómalos.

Conozca el monitor cardíaco insertable (MCI) Reveal LINQ



Tamaño real

El MCI Reveal LINQ es un dispositivo pequeño que se coloca debajo de la piel y puede controlar el corazón durante un período máximo de tres años.[†] No es visible en la mayoría de los pacientes.

[†]Consulte el manual del médico del MCI Reveal LINQ para ver los parámetros de uso.

Confíe en el monitor cardíaco insertable más pequeño del mundo¹

Avanzado

Cierta información sobre el corazón solo se puede obtener gracias al monitoreo a lo largo del tiempo. El MCI Reveal LINQ también es capaz de detectar latidos cardíacos anómalos que son difíciles de percibir con otros monitores.

Eficiente

Un único implante reemplaza el uso de docenas de monitores cardíacos a corto plazo. De esta forma, se acelera el diagnóstico y el tratamiento.[‡]

Siempre activado

Usted puede disfrutar de su vida mientras los médicos controlan su corazón.

Conveniente

Menos visitas al médico.[§] No más cables ni parches adhesivos. No más cambios en sus actividades diarias o en sus planes de viaje. El monitor cardíaco implantado lo acompaña dondequiera que vaya, lo que significa menos trabajo para usted y sus cuidadores.

Inteligente y personalizado

El MCI Reveal LINQ le envía a su médico información automática sobre el corazón que se personaliza según su afección. Usted incluso puede marcar los síntomas para que su médico haga coincidir los latidos cardíacos con lo que siente en ese momento.


Hable con su médico para obtener más información sobre los riesgos y beneficios del monitoreo remoto, y para determinar si el MCI Reveal LINQ es adecuado para usted.

[‡]Un implante dura hasta tres años; el monitoreo durante este período significaría el uso de 36 monitores de 30 días.

[§]En comparación con los monitores a corto plazo.

Cómo funciona

Un procedimiento seguro y rápido

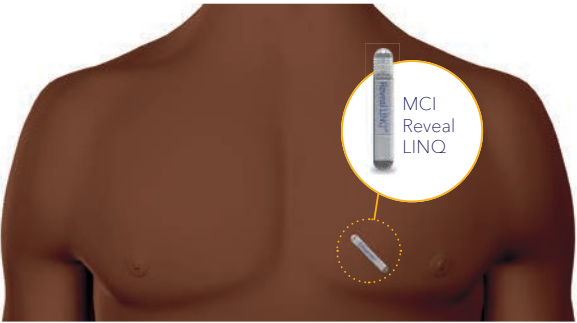

La inserción de un monitor cardíaco de Medtronic suele tardar menos de cinco minutos.

No requiere anestesia general.

El monitor se coloca justo debajo de la piel durante un procedimiento ambulatorio.

Luego, puede seguir con su día.



Conexión remota y personalizada con su médico



Tras el implante, regresará a su casa con un transmisor de paciente, a fin de enviar la información relacionada con el corazón del MCI Reveal LINQ a su médico.^Ω



También podría recibir un asistente del paciente que cuenta con un botón para que lo presione si tiene síntomas.



El MCI Reveal LINQ controla y registra los latidos cardíacos anómalos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de modo que pueda seguir disfrutando de su vida.



Lo único que tiene que hacer es mantener el transmisor de paciente conectado.



Su médico accederá a la información relacionada con el corazón de forma remota desde su consultorio y se comunicará con usted si fuera necesario.

^ΩConsulte el manual del paciente para obtener más información sobre cómo configurar el transmisor de paciente.

Seguridad

Descanse tranquilo al saber que su dispositivo...



Tiene evidencia clínica y un alto nivel de confiabilidad

Los monitores cardíacos de Medtronic son los dispositivos implantados más pequeños¹ y con más estudios clínicos² del mundo.

Más de 1,5 millones de personas se han implantado y controlado con un monitor cardíaco implantable de Medtronic.³



Mantiene sus datos seguros

El monitor usa tecnología Bluetooth® de baja energía para enviar la información relacionada con el corazón a la aplicación de su teléfono. La seguridad de sus datos es una de las prioridades principales para Medtronic. La conectividad de este dispositivo se diseñó para proteger sus datos.



Puede usarse de forma segura en los entornos de RM^{††}

Presente la tarjeta de identificación del dispositivo al técnico de diagnóstico por imágenes para que pueda acceder a más información.



Es seguro para los sistemas de seguridad de los aeropuertos

Los procedimientos de seguridad o de escaneo no afectarán su monitor cardíaco.

Costo y cobertura

Los monitores cardíacos insertables de Medtronic están ampliamente cubiertos por Medicare y las compañías de seguro privado. Hable con su compañía de seguro para conocer los costos que debería pagar por el implante o el monitoreo.



¿Tiene alguna pregunta? Visite [MonitorYourHeart.com](https://www.monitoryourheart.com) si desea consultar las preguntas frecuentes y obtener más información.

Hable con su médico

El monitoreo cardíaco a largo plazo debe ser indicado por su médico; no todas las personas pueden realizarse este tratamiento. Consulte a su médico para determinar si es adecuado para usted. El médico deberá conversar con usted sobre todos los posibles beneficios y riesgos. Si bien muchos pacientes se benefician del monitoreo a largo plazo, los resultados pueden variar.

Para obtener más información, llame al número gratuito de Medtronic 1-800-551-5544 (de lunes a viernes, de 7:00 a 19:00 horas, hora del centro) o visite la página de Internet de Medtronic en Medtronic.com/HeartMonitorISI.



Referencias

¹ Guía de comparación de tamaños de MCI. Datos de archivo de Medtronic. 2021.

² Publicaciones sobre Reveal™ de Medtronic. Datos de archivo de Medtronic. 2022.

³ Datos de la familia de MCI Reveal™ de Medtronic. Datos de archivo. 2021.

Monitor cardíaco insertable Reveal LINQ™ LNQ11 y asistente del paciente

El monitor cardíaco insertable Reveal LINQ es un sistema de monitoreo implantable activado automáticamente en el paciente que registra un electrocardiograma (ECG) subcutáneo y se indica en los siguientes casos:

- Pacientes con síndromes clínicos o situaciones de alto riesgo de arritmias cardíacas.
- Pacientes que experimentan síntomas temporales, como mareos, palpitaciones, síncope y dolores de pecho, que pueden sugerir la existencia de una arritmia cardíaca.

El dispositivo no ha sido probado específicamente para uso pediátrico.

Entre los posibles riesgos asociados al implante de un monitor cardíaco insertable Reveal LINQ, se incluyen, entre otros, infección en el lugar de la cirugía, migración del dispositivo, erosión del dispositivo a través de la piel y sensibilidad al material del dispositivo.

Un médico debe prescribir el tratamiento con el monitor cardíaco insertable Reveal LINQ. Este tratamiento no es apropiado para todos los pacientes. Consulte a su médico para determinar si es adecuado para usted. El médico deberá conversar con usted sobre todos los posibles beneficios y riesgos. Si bien muchos pacientes se benefician con este tratamiento, los resultados pueden variar.

Consulte el manual del dispositivo para obtener información detallada sobre las instrucciones de uso, indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y posibles complicaciones o eventos adversos. Para obtener más información, llame a Medtronic al 1 (800) 328-2518 o consulte la página de Internet de Medtronic en www.medtronic.com.

Precaución: Las leyes federales (EE. UU.) limitan la venta de estos dispositivos exclusivamente a médicos o bajo prescripción facultativa.

Información adicional sobre el dispositivo

Monitor CareLink™ de Medtronic y red CareLink de Medtronic

Uso previsto: El monitor CareLink™ y la red CareLink de Medtronic están indicados para la transferencia de datos del paciente desde algunos dispositivos cardíacos implantables de Medtronic y deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones del médico y como se describe en el manual del producto implantable. Estos productos no sustituyen la atención médica correspondiente en casos de emergencia y solo deben utilizarse según las indicaciones de un médico.

Contraindicaciones: No existen contraindicaciones para el monitor CareLink.

Advertencias y precauciones: El monitor CareLink solo se debe usar para interrogar a los dispositivos implantables de Medtronic que sean compatibles. El monitor CareLink está concebido para uso dentro del país en que fue recetado.

©2022 Medtronic. Medtronic, el logotipo de Medtronic e "Ingeniería para lo extraordinario" son marcas comerciales de Medtronic. Los logotipos y la marca denominativa Bluetooth® son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Medtronic se realiza bajo licencia. Las marcas de terceros indicadas con el símbolo ™* son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una compañía de Medtronic.

Hable con su médico para determinar si el monitoreo a largo plazo es adecuado para usted y si está preparado para programar la inserción.

Obtenga más información en
[MonitorYourHeart.com](https://www.monitoryourheart.com)

Regístrese para saber si el MCI Reveal LINQ es adecuado para usted.



Medtronic
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432-5604
EE. UU.

Llamadas gratuitas en los EE. UU.:
800.633.8766
Internacional: +1.763.514.4000

[medtronic.com](https://www.medtronic.com)

UC201602395a SL
©2022 Medtronic.
Minneapolis, MN.
Todos los derechos reservados.
Impreso en EE. UU.
04/2022