



Mit Sicherheit wissen,
dass die Blutung
gestoppt ist.

Endoskopische Chirurgie

Vorbereitung des Veriset™ Hämostase Patch

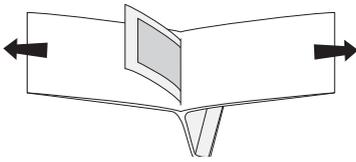


1. Öffnen Sie den Folienbeutel außerhalb des sterilen Feldes.

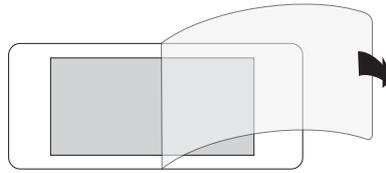


2. Öffnen Sie den Tyvek™-Beutel innerhalb des sterilen Feldes. Verwenden Sie das Veriset™ Patch innerhalb von 60 Minuten nach dem Öffnen des Folienbeutels. Veriset™ Patch so auf der Blutungsstelle platzieren, dass der blutende Bereich um ungefähr 1-2 cm hinaus überdeckt wird. Das Veriset™ Patch kann je nach Bedarf auf die passende Größe zugeschnitten werden.


Anwendung des Veriset™ Patch bei endoskopischen Eingriffen

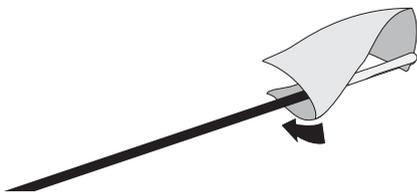


3. Fassen Sie das Veriset™ Patch an einer Ecke mit einer Faszange und rollen das Patch mit der dunklen Seite nach innen um den Schaft.

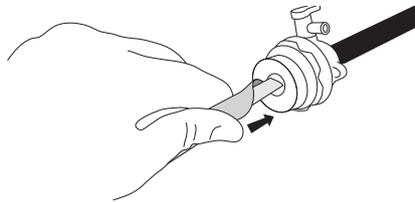

4. Schieben Sie nun das gerollte Veriset™ Patch durch eine Trokarhülle mit mindestens 10 mm Durchmesser.

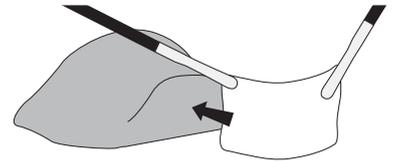

5. Platzieren Sie die dunklere Veriset™ Patch Seite auf der Blutungsstelle.

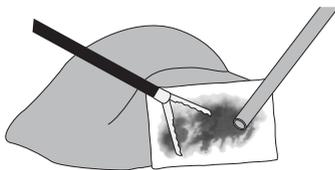

6. Drücken Sie das Veriset™ Patch mit einer Kompresse auf die Blutungsstelle und üben Sie so gleichmäßigen Druck auf die gesamte Fläche aus. Kontrollieren Sie nach 30 Sekunden, ob die Blutung steht. Sollte die Blutung nicht gestoppt sein, drücken Sie das Patch weitere 30 Sekunden an.





7. Benetzen Sie nicht durchfeuchtete Bereiche mit Kochsalzlösung und üben so lange Druck aus, bis das Patch vollständig anhaftet.

Entfernen Sie das Veriset™ Patch nicht am Ende der Operation. Das Patch verbleibt im Situs und wird innerhalb von 28 Tagen vollständig resorbiert.¹

Mit Sicherheit wissen, dass die Blutung gestoppt ist.


Offene Chirurgie

Vorbereitung des Veriset™ Hämostase Patch

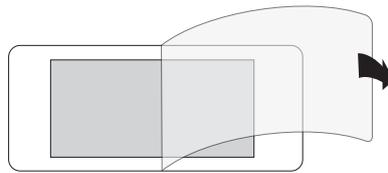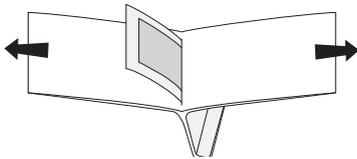

1. Öffnen Sie den Folienbeutel außerhalb des sterilen Feldes.
2. Öffnen Sie den Tyvek™-Beutel innerhalb des sterilen Feldes. Verwenden Sie das Veriset™ Patch innerhalb von 60 Minuten nach dem Öffnen des Folienbeutels. Veriset™ Patch so auf der Blutungsstelle platzieren, dass der blutende Bereich um ungefähr 1-2 cm hinaus überdeckt wird. Das Veriset™ Patch kann je nach Bedarf auf die passende Größe zugeschnitten werden.

Anwendung des Veriset™ Patch bei »offenen Eingriffen«

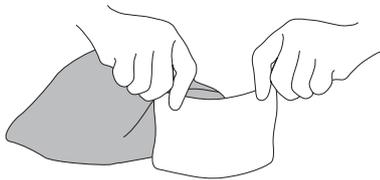

3. Platzieren Sie die dunklere Veriset™ Patch Seite auf der Blutungsstelle.
4. Halten Sie das Veriset™ Patch fest an seinem Platz. Üben Sie mit einer Komresse oder einem Tupfer gleichmäßigen Druck aus, um sicherzustellen, dass das Patch an der blutenden Stelle haftet. Bewegen Sie das Veriset™ Patch nicht und ziehen Sie es nicht ab; es haftet möglicherweise nicht wieder auf der blutenden Stelle. Wenn die Blutung nicht gestoppt ist, üben Sie erneut Druck aus und überprüfen Sie die Stelle nach 30 Sekunden erneut.
5. Benetzen Sie nicht durchfeuchtete Bereiche mit Kochsalzlösung und üben so lange Druck aus, bis das Patch vollständig anhaftet.

Entfernen Sie das Veriset™ Patch nicht am Ende der Operation. Das Patch verbleibt im Situs und wird innerhalb von 28 Tagen vollständig resorbiert.¹

1. Veriset™ Haemostatic Patch Instructions for Use and Product Specifications [package insert]. Minneapolis, MN: Medtronic, 2014.

WICHTIG: Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen über die Anwendungshinweise, Kontraindikationen, Warnhinweise und empfohlene Vorsichtsmaßnahmen.

Medtronic GmbH
Earl-Bakken-Platz 1
40670 Meerbusch
Deutschland
Tel. +49 2159-8149-0
Fax +49 2159-8149-100

Medtronic Österreich GmbH
Handelskai 94-96
1200 Wien
Österreich
Tel. +43 1 240 44-0
Fax +43 1 240 44-199

Medtronic (Schweiz) AG
Talstrasse 9
3053 Münchenbuchsee
Schweiz
Tel. +41 31 868 01 00
Fax +41 31 868 01 98

medtronic.com

Medtronic
Engineering the extraordinary